

Tecrübe, Kalite ve Bilimin Mükemmel Kesişmesi

bilimplant®
DISCOVER THE SCIENCE



CE 2975

Dental Implant Sistemi

ÜRÜN KATALOĞU 2025-26

ROCK-BİL



Feel the Privilege Power

BİLİMİ KEŞFET

DÉCOUVRIR LES SCIENCES

SCOPRI LA SCIENZA

ZBULONI SHKENCËN



वर्जिआन की खोज करे

DISCOVER THE SCIENCE

WISSENSCHAFT ENTDECKEN

ОТКРИЙТЕ НАУКАТА

مل عل فشتك

www.bilimplant.com





GENEL

Hakkımızda	3
Bilimplant Uygulamaları	4
Bilimsel Danışma Kurulumuz	5



CERRAHİ

SLA Yüzey	6
Drilleme Protokolü	7
İmplant Paketi Kullanım Talimatı.....	8
Bilimplant Tasarımı	9
Kemik ve Doku Seviyesi İmplantlar.....	10
Ø2.9 Slim İmplant	11
Kapama Vidaları ve Transfer Parçası	12
İyileşme Başlıkları	12



PROTETİK

Dayanaklar	14
Simante Dayanaklar.....	15
a.Kemik Seviyesi Dayanaklar.....	15
b.Doku Seviyesi Dayanaklar	16
Geçici Dayanaklar.....	17
Vida Tutuculu (Multi-unit) Dayanaklar.....	18-19
Hassas Tutuculu (Locator) Dayanaklar.....	20-21
Titanyum Tabanlı (Ti-base) Dayanaklar.....	22-24
Dijital Tarama Parçaları ve Dijital Analoglar.....	25
Pre-mill Dayanaklar.....	26-27
Ölçü Parçaları ve Analoglar.....	28-30



KİT ve ALETLER

Cerrahi Kit ve İçeriği	32-34
Stopper Kit	35
Sinüs Osteotom Kiti	35
Kemik Genişletme Kiti	36
Vida Çıkarma Kiti	36
Bguide Rehberli Cerrahi Kit	37
All on Four & Dayanak Seçim Kiti.....	37
Ortodontik Mini Vida Kiti	38
GBR Kit	38
Dijital Kütüphaneler.....	39



MİSYON

PROİMTECH Sağlık Ürünleri A.Ş. yaşam ve sağlık kalitesinin yükseltilmesi amacıyla teknolojiye en yeni gelişmeleri takip eden, AR-GE çalışmalarıyla kendine her geçen gün yeni değerler ekleyerek yeniliği canlı tutan ve yüksek sağlık/hayat kalitesine herkesin ulaşabilmesi için çaba gösteren bir sağlık firması olmayı hedeflemektedir.



VİZYON

Çağdaş, bilimsel ve yüksek nitelikli üretim hizmeti sunarak, dental sektörde güvenilir bir dünya markası firma olmak başlıca hedefimizdir.



Kaliteden ve bilimsellikten ödün vermeyen üretim anlayışımızın sonucu olarak; klinik ve radyografik 10 yıllık takiplerde, bilimsel literatür ile uyumlu yüksek başarı tespit edilmiştir.



Prof. Dr. Alper ALKAN

Prof. Dr., Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzm.
Proimtech A.Ş. Ortak / Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul

Prof. Dr. Çağrı URAL

Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet E. DEMİRBAŞ

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Bşk.

Prof. Dr. Hasan Ö. GÜMÜŞ

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Histomorfometrik Görünüm



3 Hafta (x4)




6 Hafta (x4)


Osseointegrasyon için kritik öneme sahip altı faktör vardır;

- Materyalin biyouyumluluğu
- İmplant dizaynı
- İmplant yüzeyi
- Konakçı kemiğin durumu
- Cerrahi teknik
- Yükleme koşulları


İsmi ve gücünü bilimden alan Bilimplant, maksimum osteointegrasyon için bilimsel literatür desteğinde üretilmektedir.

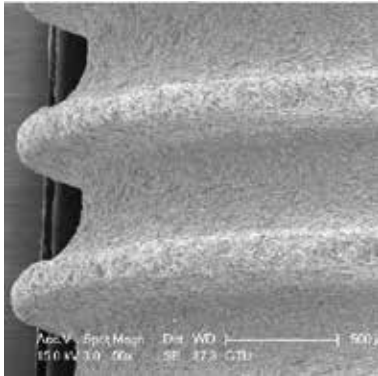

50 x

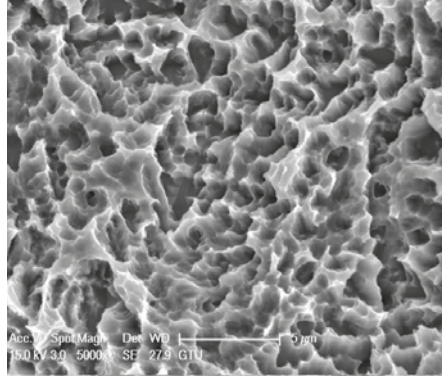


5.000 x

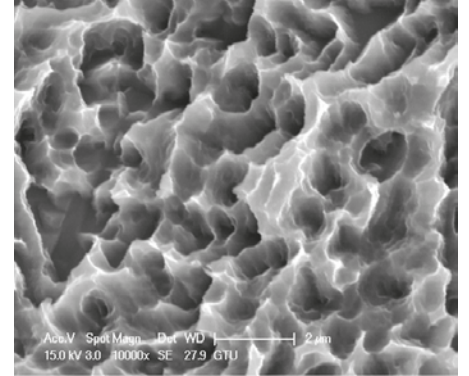

10.000 x

Bilimplant, kumlama ve çift aşındırma işlemi sonucunda 1.5 - 2.5 μm Ra değeri ile ideal ve homojen bir pürüzlü yüzeye sahiptir. Bu SLA yüzey, implant-kemik temas alanını artırarak osseointegrasyon için en iyi pürüzlülük derecesini sağlar.


DRİLLEME PROTOKOLÜ

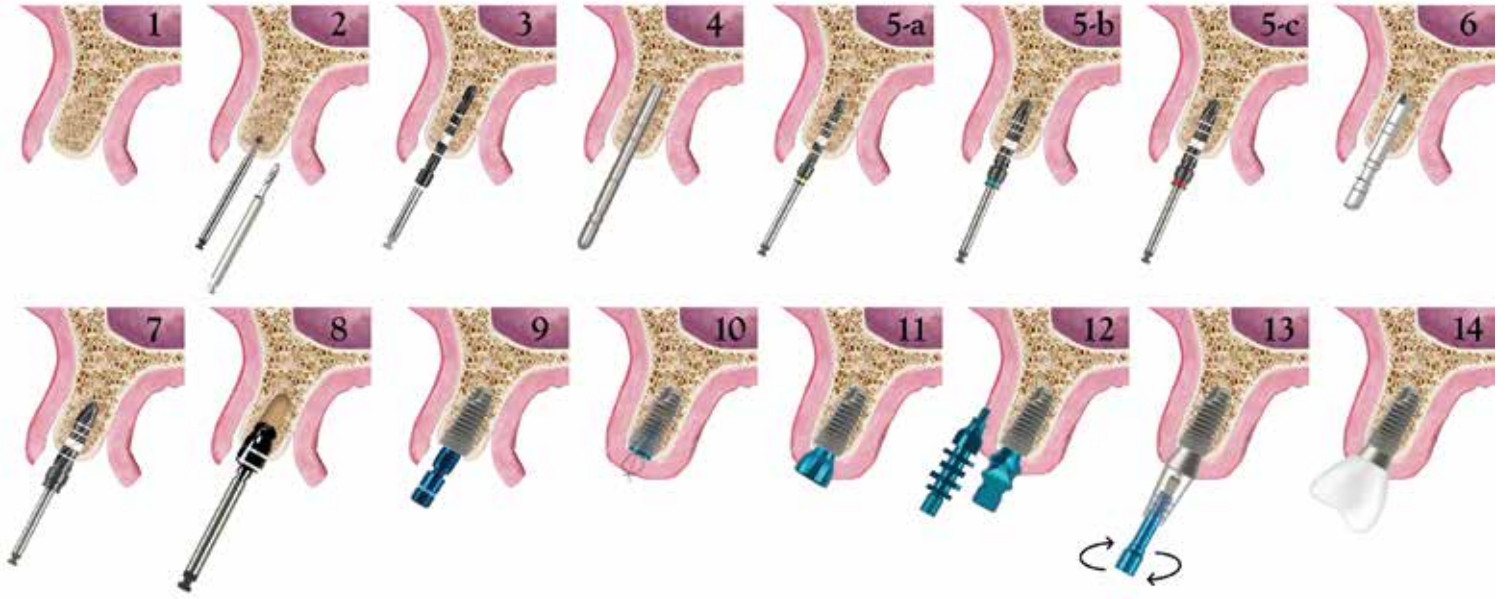

Cerrahi anguldruva (yeşil kuşak, 20:1) ile;
İdeal drilleme (implant yuvasının hazırlanması): Hız 800- 900 rpm / İdeal implant yerleştirme: Hız 30- 40 rpm, tork 30- 40 Ncm

1. İmplant uygulanacak dişsiz bölgede mukoperiosteal tam kalınlık flep kaldırılır ve kemiğe ulaşılır.
2. İşaretleme frezleri ile implantların konulacağı yer işaretlenir.
3. Pilot drill ile implant yuvası açılarak derinlik belirlenir.
4. Hizalayıcı pin ile yuvanın derinliği ve açısı kontrol edilir.
- 5 (a-c). Yerleştirilmesi planlanan çap ve boydaki implantın final drillinden önceki driller ile implant yuvası genişletilir.
6. Paralel pin ile yuvanın derinlik ve açısı kontrol edilir.
7. Final drill uygulandıktan sonra implantın yerleştirilmesi için yuva hazır hale gelir.
8. Özellikle sert kemiklerde implantın boyun kısmındaki sıkışmayı ve marjinal kemik nekrozunu önlemek için kortikal drill ile yuvanın boyun kısmı genişletilir.

9. İmplant, steril kutusundan raşet ile veya anguldruva ile alınır ve hazırlanan yuvaya saat yönünde çevirerek yerleştirilir.
10. İmplant yerleştirildikten sonra yumuşak dokunun implant içine girmesini önlemek için kapama vidası saat yönünde sıkılarak yerleştirilir ve ameliyat sahası primer olarak kapatılır.
11. 8-12 haftalık osseointegrasyon süresi beklendikten sonra implant üzeri açılır ve kapama vidası çıkarılarak diş eti uyumu için uygun olan iyileşme başlığı yerleştirilir.
12. Diş eti uyumu sağlandıktan sonra açık veya kapalı yöntem ile ölçü alınır.
13. Hastaya uygun olan dayanak seçilir ve 30 Ncm kuvvet ile sabitlenir.
14. Protetik aşamalardan sonra hazırlanmış olan kron, dayanak üzerine yapıştırılır veya vidalanır.

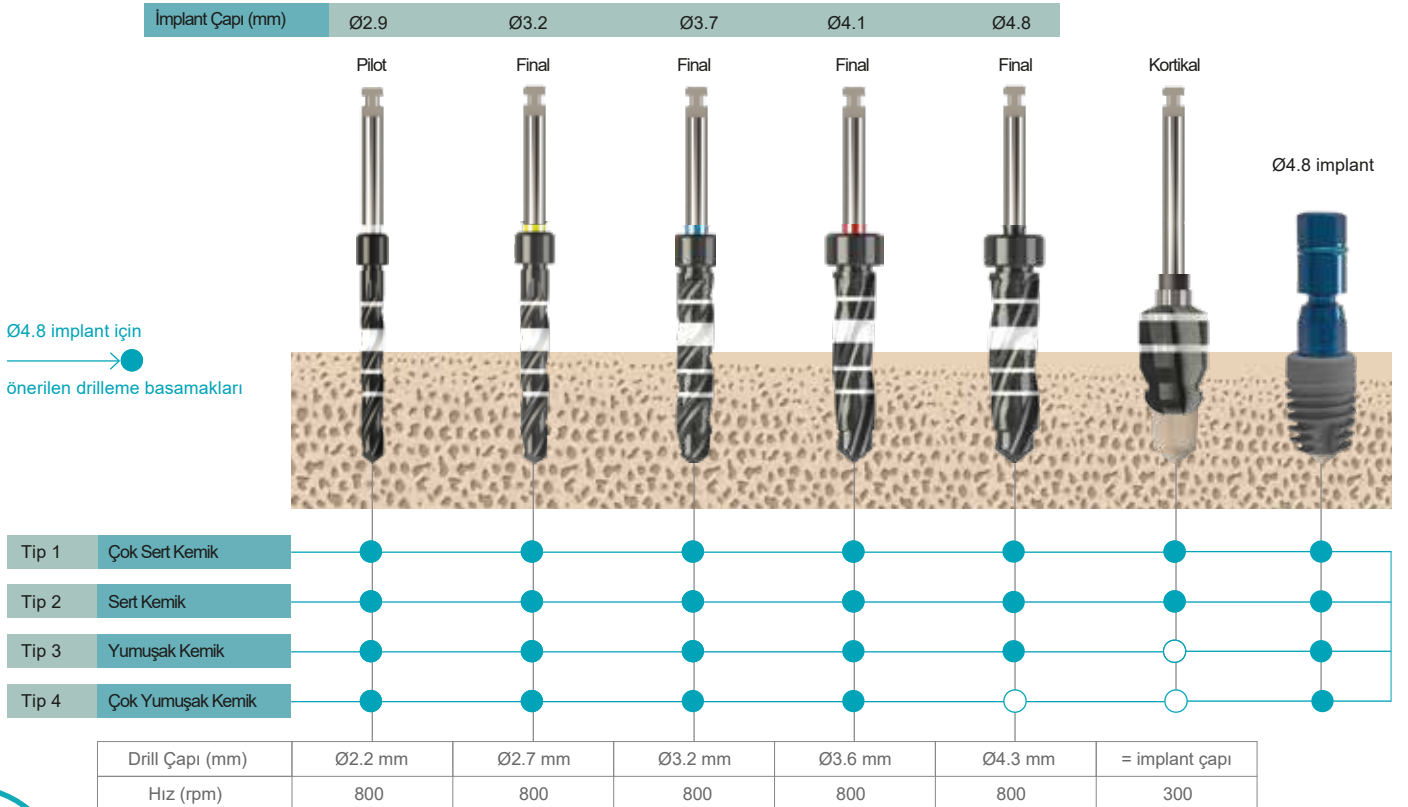

Şekil 1. Kemik tiplerine göre kemik/doku seviyesi implantların yerleştirilmesi için önerilen drilleme prosedürü.

İMLANT PAKETİ KULLANIM TALİMATLARI



Kutu, üzerindeki delikli kısma bastırılıp yırtılarak açılır.



Blister paket kutudan çıkarılır.



"Open" yazısı dikkate alınarak tyvek kağıt açılır.



İmplant kutusunun kapağı, saatin ters yönünde çevirilerek açılır. Kapakta bulunan güvenlik halkasının kopuk olmamasına dikkat edilmelidir. Güvenlik halkası kopuk olan ürün kullanılmamalıdır.



İmplant kapak ile birlikte tüp içerisinden dışarı çıkartılır.



İmplantta monte edilmiş renk kodlu (sarı veya mavi platform) transfer parçasına raşet veya anguldruva ile adaptör takılır. Transfer parçasındaki hassas üretim ve silikon halka sayesinde implant ağıza taşınırken düşmez. İmplantın dik konumda taşınmasına gerek yoktur.



Raşet 90° açı ile aşağı doğru itilerek implant iç kutu gövdesinden ayrılır. İmplant yerleştirildikten sonra transfer parçası pens yardımı ile veya ek araçlar olmadan el ile çıkarılabilir. Transfer parçası, komşu implantların paralel yerleştirilmesi için bir hizalama pini olarak da kullanılabilir. Üzerinde önceden belirlenmiş bir kırılma noktası, implantın iç yapısını korur.



Kutunun içinden çıkan kapama vidasını almak için silikon kapak kaldırılır.



SCS anahtarı kapama vidasına takıldıktan sonra hafifçe bastırılır ve yukarı doğru çekilerek yuvasından çıkarılır.




Ölçü alımı ve provaları kolaylaştıran 4 köşe bağlantı




14° konik (morse taper) bağlantı ve soğuk kaynak yüzeyi




Krestal kemik kaybını önleyen **platform switch** özelliği

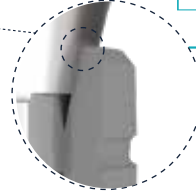

Primer stabiliteyi arttıran kare yiv tasarımı

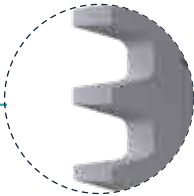

Primer stabiliteyi arttıran ve implant yerleştirilmesini kolaylaştıran self-tapping tasarımı

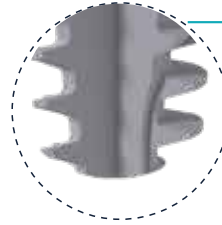


Bilimplant kemik seviyesi implantları doğal bir görünüm ve his için tasarlanmıştır. Pek çok endikasyon için mükemmel esneklik ve dengeli bir protez portföyü sunar. Günlük pratikte mükemmel klinik performans, olağanüstü estetik ve yüksek hasta memnuniyeti anlamına gelir.

Kemik Seviyesi İmplantlar



Ürün Kodu	İmplant Çapı	Uzunluk	
PBL2910	Ø 2.9 mm	10 mm	Slim (SP, M1.4)
PBL2912		12 mm	
PBL2914		14 mm	
PBL3208	Ø 3.2 mm	8 mm	Dar Platform (sarı) (NP, M1.6)
PBL3210		10 mm	
PBL3212		12 mm	
PBL3214	Ø 3.7 mm	14 mm	
PBL3708		8 mm	Regular Platform (mavi) (RP, M1.8)
PBL3710		10 mm	
PBL3712	Ø 4.1 mm	12 mm	
PBL3714		14 mm	
PBL4108	Ø 4.8 mm	8 mm	Regular Platform (mavi) (RP, M1.8)
PBL4110		10 mm	
PBL4112		12 mm	
PBL4114	Ø 4.8 mm	14 mm	
PBL4808		8 mm	Regular Platform (mavi) (RP, M1.8)
PBL4810		10 mm	
PBL4812		12 mm	

Doku Seviyesi İmplantlar

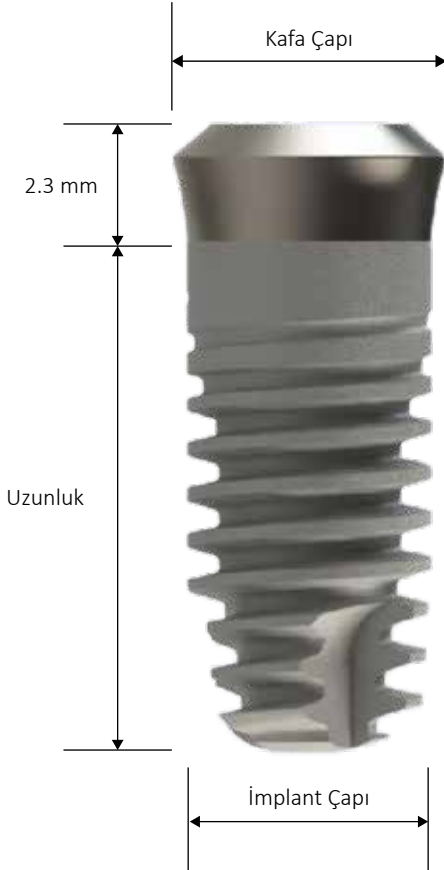

Ürün Kodu	İmplant Çapı	Uzunluk	Kafa Çapı
PTL4106	Ø 4.1 mm	6 mm	Ø 4,8 mm
PTL4108		8 mm	
PTL4110		10 mm	
PTL4112		12 mm	
PTL4114	Ø 4.8 mm	14 mm	Ø 6 mm
PTL4806		6 mm	
PTL4808		8 mm	
PTL4810		10 mm	
PTL4812		12 mm	


Kemik Seviyesi Ø2.9 Slim (SP) İmplant

SP İmplant Ø2.9




PBL2910	PBL2912	PBL2914	Ürün Kodu
10	12	14	Uzunluk (mm)

İyileşme Başlıkları

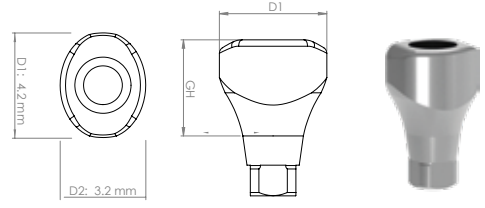

D1 x D2	GH	Ürün Kodu
4.2 x 3.2 mm	2.5 mm	BLHCH25SP
	4 mm	BLHCH4SP
	6 mm	BLHCH6SP

Ti-base Açılı Kron Tipi Dayanaklar

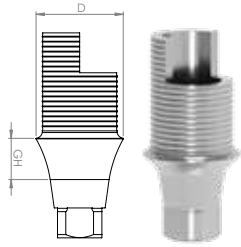

D	GH	Ürün Kodu
3.5 mm	1 mm	BLATIBLAGH1SP
	2 mm	BLATIBLAGH2SP
	3 mm	BLATIBLAGH3SP

Açık Ölçü Transfer Parçası



Ürün Kodu
IP0021

Kapalı Ölçü Transfer Parçası



Ürün Kodu
IP0023

Analog



Ürün Kodu
IP0025

Endikasyonlar

Lateral kesiciler (maxilla)



Santral ve lateral kesiciler (mandible)

İnceliği Keşfet

- Dar interdental boşluklar veya azalmış kemik hacmi gibi zorlu endikasyonlar yenilikçi çözümler gerektirir
- Estetik bölgede daha ince implant kullanımının endike olduğu durumlarda Ø2.9 mm implantın ayrıcalığını yaşayın
- Kolay kullanım
- Dönmeye karşı kesin ve uzun süreli mekanik stabilite
- 4 köşe bağlantı
- 8° konik bağlantı

Kapama Vidaları

Ø3.2 ve Ø3.7 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin

PCSNP



Kemik Seviyesi- Dar Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin

PCSRP



Kemik Seviyesi- Regular Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Doku Seviyesi İmplantlar İçin

PCSTRP




Doku Seviyesi- Regular Platform

Transfer Parçası

Transfer parçası implant yerleştikten sonra kolayca çıkabilen sisteme sahiptir. Ayrıca sert kemikte ortalama 125 Ncm kuvvette kırılan güvenlik halkası mevcuttur. Bu sayede implant iç yüzeyleri korunmuş ve marjinal kemik kaybı önlenmiş olur.

Ø3.2 ve Ø3.7 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin


PTPNP

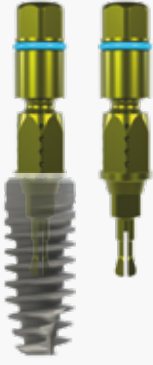

Kemik Seviyesi- Dar Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Kemik Seviyesi İmplantlar İçin

PTPRP

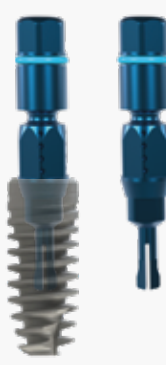

Kemik Seviyesi- Regular Platform

Ø4.1 ve Ø4.8 Doku Seviyesi İmplantlar İçin

PTPRP



Doku Seviyesi- Regular Platform


İyileşme Başlıkları

Kemik Seviyesi

Ø3.2 ve Ø3.7 İmplantlar İçin



Ø4.1 ve Ø4.8 İmplantlar İçin

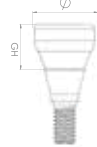

Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø3.5	3 mm	BLHC35H3NP
Ø3.5	4 mm	BLHC35H4NP
Ø3.5	6 mm	BLHC35H6NP
Ø4.5	3 mm	BLHC45H3NP
Ø4.5	4 mm	BLHC45H4NP
Ø4.5	6 mm	BLHC45H6NP

Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø5.0	3 mm	BLHC50H3RP
Ø5.0	4 mm	BLHC50H4RP
Ø5.0	6 mm	BLHC50H6RP
Ø6.5	3 mm	BLHC65H3RP
Ø6.5	4 mm	BLHC65H4RP
Ø6.5	6 mm	BLHC65H6RP


Vida Tutuculu (Multi-Unit)




Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø4.5	4.9 mm	BLHCMLT

Doku Seviyesi

Ø4.1 İmplantlar İçin

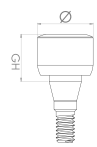

Ø4.8 İmplantlar İçin

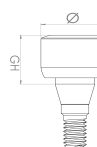

Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø4.1	2 mm	RNTLHCH2
Ø4.1	4 mm	RNTLHCH4
Ø4.1	6 mm	RNTLHCH6

Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø4.8	2 mm	WNTLHCH2
Ø4.8	4 mm	WNTLHCH4
Ø4.8	6 mm	WNTLHCH6

Vida Tutuculu (Multi-Unit)
Ø4.1 İmplantlar İçin



Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø5.45	4.7 mm	RNTLHCMLT

Vida Tutuculu (Multi-Unit)
Ø4.8 İmplantlar İçin



Çap (mm)	GH	Ürün Kodu
Ø6.75	5 mm	WNTLHCMLT

DAYANAKLAR

Tüm dayanaklarda yükleme tork değeri **30 Ncm** dir.


Multi-Unit dayanaklarda da yükleme tork değeri **30 Ncm** olup, ikincil üst vida tork değeri ise **15 Ncm** dir.

Kemik Seviyesi Dayanaklar (Simante)

Kemik
Seviyesi

Düz Dayanaklar

Kemik Seviyesi

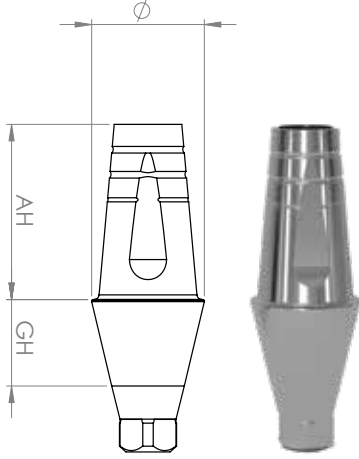

Dar Platform

Regular Platform




Çap (mm)	GH	AH	Ürün Kodu
Ø3.5	1 mm	5.5 mm	BLSA35GH1AH55NP
Ø3.5	2 mm	5.5 mm	BLSA35GH2AH55NP
Ø3.5	3 mm	5.5 mm	BLSA35GH3AH55NP
Ø3.5	4 mm	5.5 mm	BLSA35GH4AH55NP
Ø3.5	5 mm	5.5 mm	BLSA35GH5AH55NP
Ø4.5	1 mm	7 mm	BLSA45GH1AH7NP
Ø4.5	2 mm	7 mm	BLSA45GH2AH7NP
Ø4.5	3 mm	7 mm	BLSA45GH3AH7NP
Ø4.5	4 mm	7 mm	BLSA45GH4AH7NP
Ø4.5	5 mm	7 mm	BLSA45GH5AH7NP
Ø5	1 mm	7 mm	BLSA50GH1AH7RP
Ø5	2 mm	7 mm	BLSA50GH2AH7RP
Ø5	3 mm	7 mm	BLSA50GH3AH7RP
Ø5	4 mm	7 mm	BLSA50GH4AH7RP
Ø5	5 mm	7 mm	BLSA50GH5AH7RP
Ø6	1 mm	7 mm	BLSA60GH1AH7RP
Ø6	2 mm	7 mm	BLSA60GH2AH7RP
Ø6	3 mm	7 mm	BLSA60GH3AH7RP
Ø6	4 mm	7 mm	BLSA60GH4AH7RP
Ø6	5 mm	7 mm	BLSA60GH5AH7RP

*Tüm dayanak vidalarında klinik ve laboratuvar kullanımının bir arada yapılmasıyla metal yorgunluğu oluşur ve vida kırığı/gevşemesi riski artar. Bu sebeple Bilimplant, klinik kullanımda (nihai dayanak torklaması sırasında) renkli vidaların kullanılmasını, laboratuvar işlemleri ve provalarda ise standart renksiz vidaların kullanılmasını önermektedir.

Açılı Dayanaklar


Kemik Seviyesi

A açılı

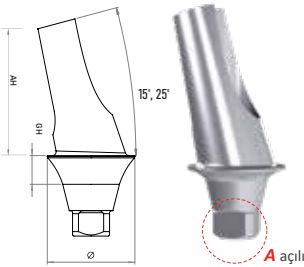

Dar Platform

B açılı

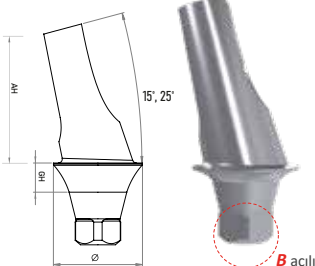


Regular Platform

Açı	GH	AH	A açılı Ürün Kodu	B açılı Ürün Kodu
15°	1 mm	7 mm	BLAAA15GH1AH7NP	BLAAB15GH1AH7NP
15°	2 mm	7 mm	BLAAA15GH2AH7NP	BLAAB15GH2AH7NP
15°	3 mm	7 mm	BLAAA15GH3AH7NP	BLAAB15GH3AH7NP
15°	4 mm	7 mm	BLAAA15GH4AH7NP	BLAAB15GH4AH7NP
25°	1 mm	7 mm	BLAAA25GH1AH7NP	BLAAB25GH1AH7NP
25°	2 mm	7 mm	BLAAA25GH2AH7NP	BLAAB25GH2AH7NP
25°	3 mm	7 mm	BLAAA25GH3AH7NP	BLAAB25GH3AH7NP
25°	4 mm	7 mm	BLAAA25GH4AH7NP	BLAAB25GH4AH7NP
15°	1 mm	7 mm	BLAAA15GH1AH7RP	BLAAB15GH1AH7RP
15°	2 mm	7 mm	BLAAA15GH2AH7RP	BLAAB15GH2AH7RP
15°	3 mm	7 mm	BLAAA15GH3AH7RP	BLAAB15GH3AH7RP
15°	4 mm	7 mm	BLAAA15GH4AH7RP	BLAAB15GH4AH7RP
25°	1 mm	7 mm	BLAAA25GH1AH7RP	BLAAB25GH1AH7RP
25°	2 mm	7 mm	BLAAA25GH2AH7RP	BLAAB25GH2AH7RP
25°	3 mm	7 mm	BLAAA25GH3AH7RP	BLAAB25GH3AH7RP
25°	4 mm	7 mm	BLAAA25GH4AH7RP	BLAAB25GH4AH7RP

Tüm açılı simante dayanaklarımızda yerleştirme seçeneğini arttırabilmek için dayanağın implant gövdesine göre 8 farklı şekilde oturtulabildiği A ve B açılı tipleri imal edilmiştir. Bu sayede freze ile dayanak düzeltme ihtiyacı azalır.

Doku Seviyesi Dayanaklar (Simante)

Düz Dayanak

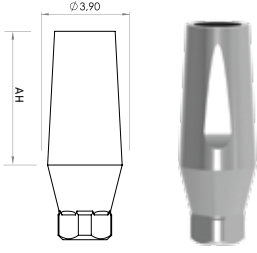


AH

Ürün Kodu


7 mm

TLAAAH7

Açılı Dayanaklar

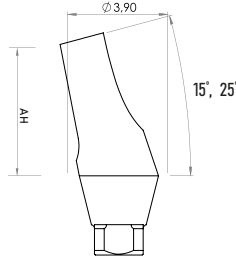

A açılı

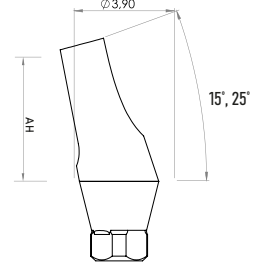

B açılı

Açı

AH

Ürün Kodu

15°

7 mm

TLAA15AH7

25°

7 mm

TLAA25AH7

Açı

AH

Ürün Kodu

15°

7 mm

TLAAB15AH7

25°

7 mm

TLAAB25AH7


“Gülme, yan etkisi olmayan yatıştırıcı bir ilaçtır.”

Arnold Glashow



Simante Geçici Dayanaklar

Kemik Seviyesi

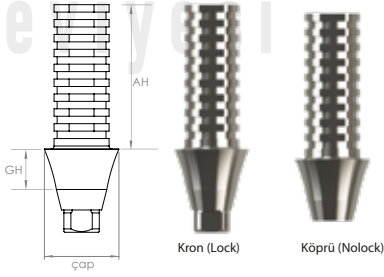


Dar Platform

Regular Platform

Çap (mm)	GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.3	1 mm	9.7mm	BLTAGH1LNP	BLTAGH1NLNP
Ø4.3	2 mm	9.7mm	BLTAGH2LNP	BLTAGH2NLNP
Ø4.3	3 mm	9.7mm	BLTAGH3LNP	BLTAGH3NLNP
Ø4.3	4 mm	9.7mm	BLTAGH4LNP	BLTAGH4NLNP
Ø4.3	5 mm	9.7mm	BLTAGH5LNP	BLTAGH5NLNP
Ø5.0	1 mm	9.7mm	BLTAGH1LRP	BLTAGH1NLRP
Ø5.0	2 mm	9.7mm	BLTAGH2LRP	BLTAGH2NLRP
Ø5.0	3 mm	9.7mm	BLTAGH3LRP	BLTAGH3NLRP
Ø5.0	4 mm	9.7mm	BLTAGH4LRP	BLTAGH4NLRP
Ø5.0	5 mm	9.7mm	BLTAGH5LRP	BLTAGH5NLRP

Doku Seviyesi

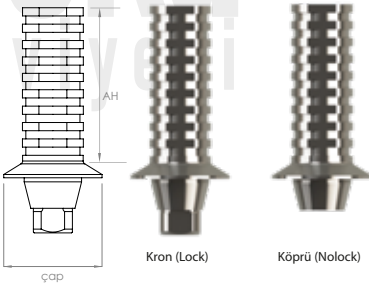

Ø4.1 implant

Ø4.8 implant

Çap (mm)	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.8	9.7mm	RNTLTLOCKA	RNTLTNLOCKA
Ø6.0	9.7mm	WNTLTLOCKA	WNTLTNLOCKA

Vida Tutuculu (Multi-unit) Geçici Dayanaklar

Kemik Seviyesi

Kron (Lock)



BLMLTAL

Köprü (Nolock)



BLMLTANL

Doku Seviyesi

Kron (Lock)



RNTLTAL

Ø4.1



WNTLTAL

Ø4.8

Köprü (Nolock)



RNTLTANL

Ø4.1




WNTLTANL

Ø4.8

Düz Multi-unit (Vida Tutuculu) Dayanaklar

Kemik Seviyesi

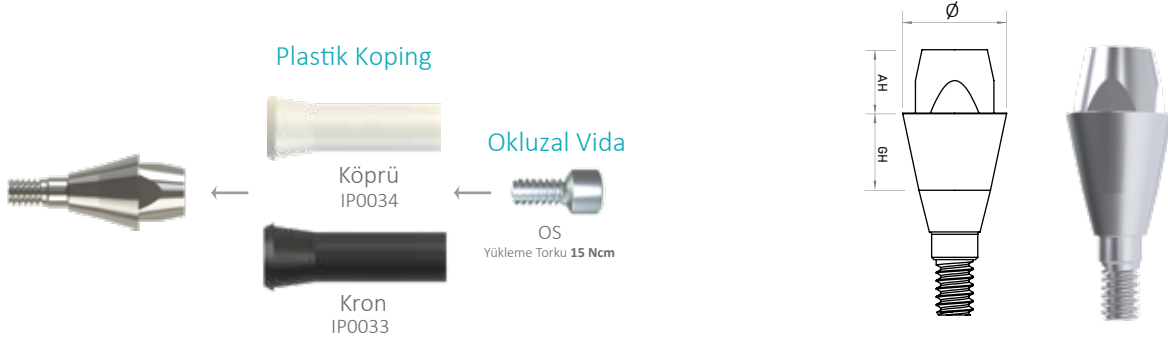

	Çap (mm)	GH	AH	Ürün Kodu
Dar Platform	Ø4.5	1 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH1NP
	Ø4.5	2 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH2NP
	Ø4.5	3 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH3NP
	Ø4.5	4 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH4NP
	Ø4.5	5 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH5NP
Regular Platform	Ø4.5	1 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH1RP
	Ø4.5	2 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH2RP
	Ø4.5	3 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH3RP
	Ø4.5	4 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH4RP
	Ø4.5	5 mm	2.7 mm	BLMLTSA45GH5RP

Doku Seviyesi


Ürün Kodu

TLMLTSAH55




Açılı Multi-unit (Vida Tutuculu) Dayanaklar

Kemik Seviyesi

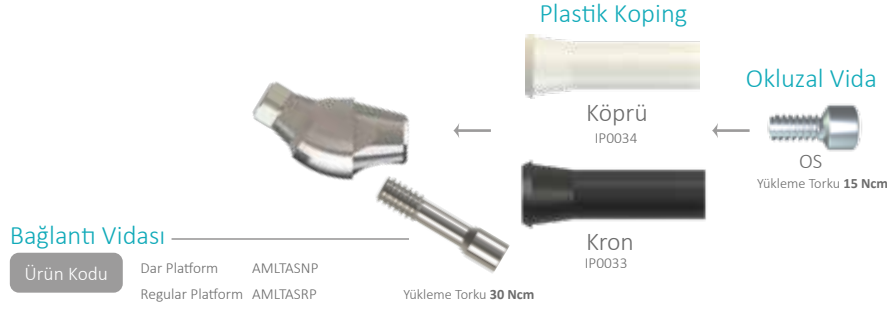

A açılı dayanaklar

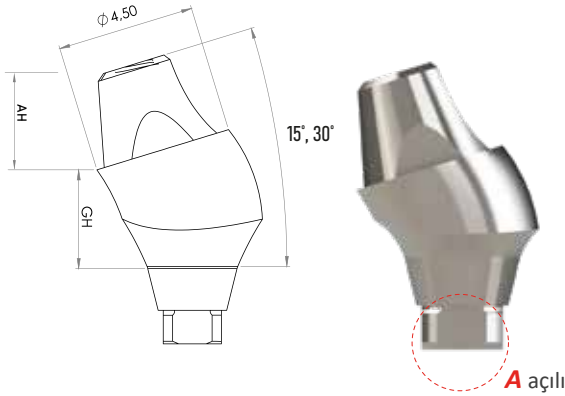


Dar Platform

Regular Platform

A açılı

Açı	GH	AH	Ürün Kodu
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH1NP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH2NP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH3NP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH4NP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH1NP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH2NP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH3NP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH4NP
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH1RP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH2RP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH3RP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA15GH4RP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH1RP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH2RP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH3RP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAA30GH4RP

B açılı dayanaklar

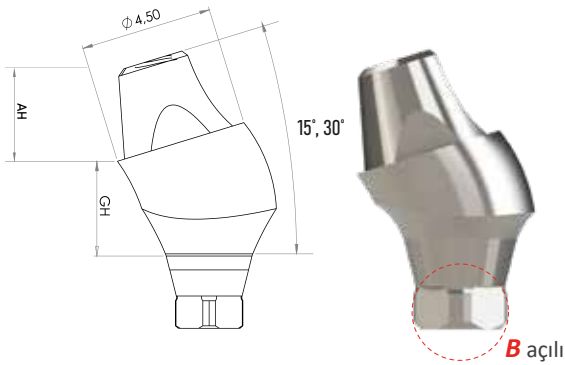

Dar Platform

Regular Platform

B açılı

Açı	GH	AH	Ürün Kodu
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH1NP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH2NP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH3NP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH4NP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH1NP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH2NP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH3NP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH4NP
15°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH1RP
15°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH2RP
15°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH3RP
15°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB15GH4RP
30°	1 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH1RP
30°	2 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH2RP
30°	3 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH3RP
30°	4 mm	2.7 mm	BLMLTAAB30GH4RP

Hassas Tutuculu (Locator) Dayanaklar

LOC-BIL Tutucu Sistem®

İmplant destekli overdenture protezlerde rahatlığı ve güvenilirliği hissedin!



DLC YÜZEY

DLC kaplı hassas tutuculu dayanaklar, çizilmez yüzey sertliği ve pürüzsüzlüğü sayesinde bakteri plağı ve diş taşı birikimini minimumda tutar. Dayanağın ve matriks tutucuların aşınmasını engeller.



AÇISAL SAPMANIN TELAFİSİ

Açılı Loc-bil® dayanaklarla kombinasyonu, implantlar arasında 70°'ye kadar açılanmaları telafi eder

DİŞ ETİ YÜKSEKLİKLERİ

Düz ve açılı Loc-bil® dayanaklar için 5 farklı diş eti yükseklik seçeneği vardır



PEEK MATRİKSLER

PEEK (polietereterketon) matriksleri, hem düz hem de eğimli implantlarda 30.000'den fazla kullanım için uzun süreli tutuculuk sağlamaktadır



Ürün Kodu
IP0057

Locator Analöğü*



Ürün Kodu
IP0058

Locator Ölçü Postu*

*Hem kemik seviyesi hem de doku seviyesi implantlar için Locbil® dayanaklarla birlikte kullanılmaktadır.



Bilimplant® metal housing ve PEEK matriksler birlikte kullanılmalıdır, başka marka ürünler ile kombine edilmemelidir.

Düz Locator Dayanaklar


Kemik Seviyesi



GH Ürün Kodu

Dar Platform	2 mm	BLOCGH2NP
	3 mm	BLOCGH3NP
	4 mm	BLOCGH4NP
	5 mm	BLOCGH5NP
	6 mm	BLOCGH6NP
	2 mm	BLOCGH2RP
Regular Platform	3 mm	BLOCGH3RP
	4 mm	BLOCGH4RP
	5 mm	BLOCGH5RP
	6 mm	BLOCGH6RP

Doku Seviyesi

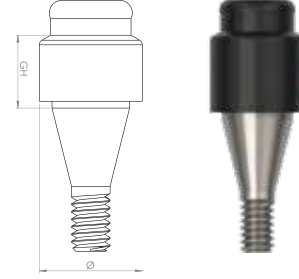


GH Ürün Kodu

Ø4.1 implant	2 mm	RNTLOC GH2
	3 mm	RNTLOC GH3
	4 mm	RNTLOC GH4
	5 mm	RNTLOC GH5
	6 mm	RNTLOC GH6
	2 mm	WNTLOC GH2
Ø4.8 implant	3 mm	WNTLOC GH3
	4 mm	WNTLOC GH4
	5 mm	WNTLOC GH5
	6 mm	WNTLOC GH6

Açılı Locator Dayanaklar

Kemik Seviyesi

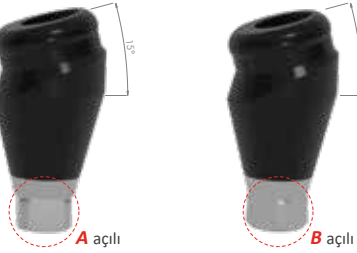

Açı GH A açılı Ürün Kodu B açılı Ürün Kodu

Dar Platform	15°	2 mm	BLOCA15GH2NP	BLOCB15GH2NP
	15°	3 mm	BLOCA15GH3NP	BLOCB15GH3NP
	15°	4 mm	BLOCA15GH4NP	BLOCB15GH4NP
	15°	5 mm	BLOCA15GH5NP	BLOCB15GH5NP
	15°	6 mm	BLOCA15GH6NP	BLOCB15GH6NP
	15°	2 mm	BLOCA15GH2RP	BLOCB15GH2RP
Regular Platform	15°	3 mm	BLOCA15GH3RP	BLOCB15GH3RP
	15°	4 mm	BLOCA15GH4RP	BLOCB15GH4RP
	15°	5 mm	BLOCA15GH5RP	BLOCB15GH5RP
	15°	6 mm	BLOCA15GH6RP	BLOCB15GH6RP

Doku Seviyesi




Açı GH A açılı Ürün Kodu B açılı Ürün Kodu

Ø4.1 implant	15°	2 mm	RNTLOCA15GH2	RNTLOCB15GH2
	15°	3 mm	RNTLOCA15GH3	RNTLOCB15GH3
	15°	4 mm	RNTLOCA15GH4	RNTLOCB15GH4
	15°	5 mm	RNTLOCA15GH5	RNTLOCB15GH5
	15°	6 mm	RNTLOCA15GH6	RNTLOCB15GH6
	15°	2 mm	WNTLOCA15GH2	WNTLOCB15GH2
Ø4.8 implant	15°	3 mm	WNTLOCA15GH3	WNTLOCB15GH3
	15°	4 mm	WNTLOCA15GH4	WNTLOCB15GH4
	15°	5 mm	WNTLOCA15GH5	WNTLOCB15GH5
	15°	6 mm	WNTLOCA15GH6	WNTLOCB15GH6

Ti-BASE DAYANAKLAR

Kemik Seviyesi Ti-Base Dayanaklar

Düz Dayanaklar

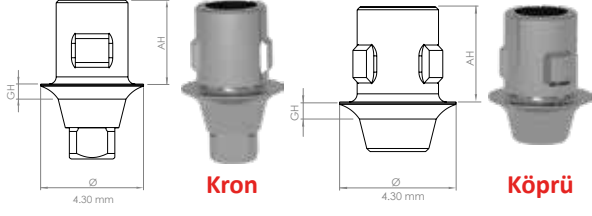


Kron

Köprü

GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
----	----	--------------------------	-----------------------------

Dar Platform	1 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH1NP	BLSTIBNLAH35GH1NP
	2 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH2NP	BLSTIBNLAH35GH2NP
	3 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH3NP	BLSTIBNLAH35GH3NP
	4 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH4NP	BLSTIBNLAH35GH4NP
	5 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH5NP	BLSTIBNLAH35GH5NP
	1 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH1NP	BLSTIBNLAH55GH1NP
	2 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH2NP	BLSTIBNLAH55GH2NP
	3 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH3NP	BLSTIBNLAH55GH3NP
	4 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH4NP	BLSTIBNLAH55GH4NP
	5 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH5NP	BLSTIBNLAH55GH5NP
Regular Platform	1 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH1RP	BLSTIBNLAH35GH1RP
	2 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH2RP	BLSTIBNLAH35GH2RP
	3 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH3RP	BLSTIBNLAH35GH3RP
	4 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH4RP	BLSTIBNLAH35GH4RP
	5 mm	3.5 mm	BLSTIBLAH35GH5RP	BLSTIBNLAH35GH5RP
	1 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH1RP	BLSTIBNLAH55GH1RP
	2 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH2RP	BLSTIBNLAH55GH2RP
	3 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH3RP	BLSTIBNLAH55GH3RP
	4 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH4RP	BLSTIBNLAH55GH4RP
	5 mm	5.5 mm	BLSTIBLAH55GH5RP	BLSTIBNLAH55GH5RP

Açılı Dayanaklar

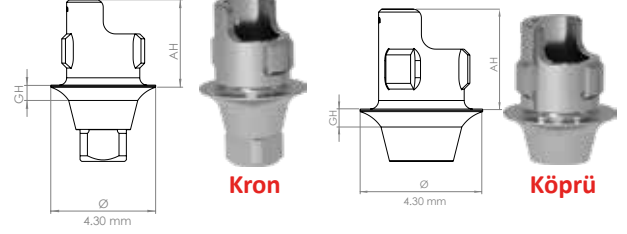

Kron


Köprü

GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
----	----	--------------------------	-----------------------------

1 mm	3.5 mm	BLATIBLAH35GH1NP	BLATIBNLAH35GH1NP
1 mm	5.5 mm	BLATIBLAH55GH1NP	BLATIBNLAH55GH1NP
1 mm	3.5 mm	BLATIBLAH35GH1RP	BLATIBNLAH35GH1RP
1 mm	5.5 mm	BLATIBLAH55GH1RP	BLATIBNLAH55GH1RP

Doku Seviyesi Ti-Base Dayanaklar


Düz Dayanaklar

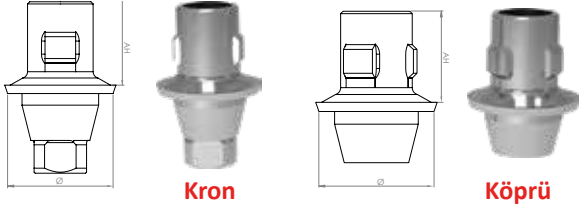

	GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.1 implant RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLSTIBLAH35	RNTLSTIBNLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLSTIBLAH55	RNTLSTIBNLAH55
Ø4.8 implant WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLSTIBLAH35	WNTLSTIBNLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLSTIBLAH55	WNTLSTIBNLAH55

RN (regular neck), WN (wide neck) : Doku seviyesi ti-base dayanaklarda, platformlar analogun boyun kısmına göre isimlendirilir.


Açılı Dayanaklar

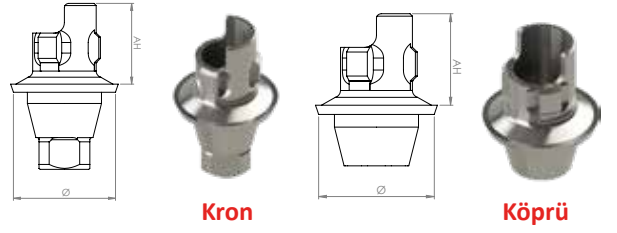

	GH	AH	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.1 implant RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLATIBLAH35	RNTLATIBNLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLATIBLAH55	RNTLATIBNLAH55
Ø4.8 implant WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLATIBLAH35	WNTLATIBNLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLATIBLAH55	WNTLATIBNLAH55


Multi-unit üzeri Ti-Base Dayanaklar

Kemik Seviyesi

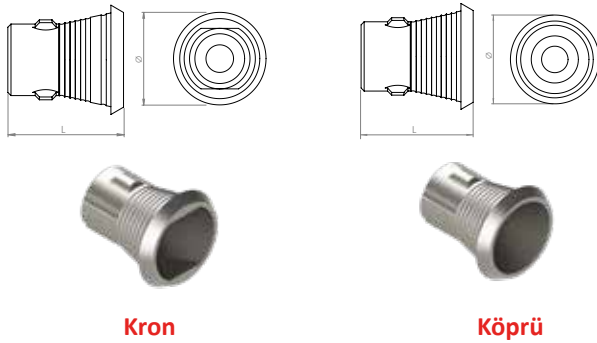

L	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
3.5 mm	BLSMLTIBLAH35	BLSMLTIBNLAH35
5.5 mm	BLSMLTIBLAH55	BLSMLTIBNLAH55

Doku Seviyesi

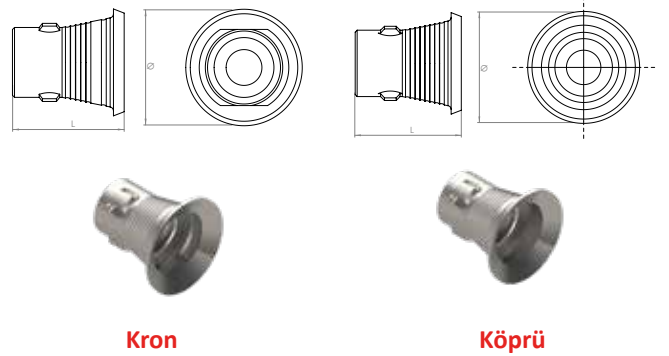

	Ø	L	Kron (Lock) Ürün Kodu	Köprü (Nolock) Ürün Kodu
Ø4.1 implant RN (regular neck)	Ø4.8 mm	3.5 mm	RNTLSMLTBLAH35	RNTLSMLTBNLAH35
	Ø4.8 mm	5.5 mm	RNTLSMLTBLAH55	RNTLSMLTBNLAH55
Ø4.8 implant WN (wide neck)	Ø6 mm	3.5 mm	WNTLSMLTBLAH35	WNTLSMLTBNLAH35
	Ø6 mm	5.5 mm	WNTLSMLTBLAH55	WNTLSMLTBNLAH55

Dijital Tarama Parçaları



Tarama Parçaları

Ürün Kodu	Parça
SB016	SP (slim platform)
SB011	NP (dar platform)
SB012	RP (regular platform)
SB031	RN (regular neck)
SB032	WN (wide neck)

Materyal: Titanyum Grade V, ZrN kaplama

Multi-unit Tarama Parçaları

Ürün Kodu	Parça
SB013	Multi-unit (NP&RP)
SB014	Multi-unit (RN)
SB015	Multi-unit (WN)

Tarama Parçası



Multi-unit Tarama Parçası

Dijital Analoglar

 BL (NP) IP0059	 BL (RP) IP0060	 BL (multi-unit, NP & RP) IP0061	 BL (SP) IP0069
 TL (RN) IP0064	 TL (WN) IP0065	 TL (multi-unit RN) IP0066	 TL (multi-unit WN) IP0067


BL : Kemik Seviyesi
 TL : Doku Seviyesi
 SP : Slim Platform (Ø2.9 BL implant)
 NP : Dar Platform (Ø3.2 - Ø3.7 BL implant)
 RP : Regular Platform (Ø4.1 - Ø4.8 BL implant)
 RN : Regular Neck (Ø4.1 TL implant)
 WN : Wide Neck (Ø4.8 TL implant)

PRE-MILL DAYANAKLAR

Pre-mill Dayanaklar, stok (fabrikasyon) dayanakların çözüm olmadığı durumlarda kişiye özgü dayanak oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.


Pre-mill Dayanaklar

Kemik Seviyesi

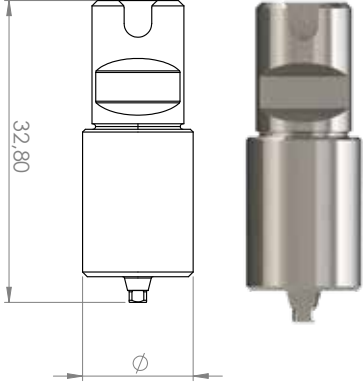

Platform	Çap(mm)	Ürün Kodu
NP (dar platform)	Ø12	BLPRA12NP
NP (dar platform)	Ø16	BLPRA16NP
RP (regular platform)	Ø12	BLPRA12RP
RP (regular platform)	Ø16	BLPRA16RP
SP (slim platform)	Ø12	BLPRA12SP
SP (slim platform)	Ø16	BLPRA16SP

Doku Seviyesi

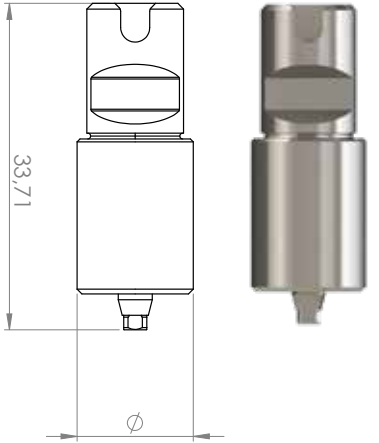

Platform	Çap(mm)	Ürün Kodu
RN (Regular Neck)	Ø12	RNTLPRA12
WN (Wide Neck)	Ø12	WNTLPRA12
RN (Regular Neck)	Ø16	RNTLPRA16
WN (Wide Neck)	Ø16	WNTLPRA16


- SP : Slim Platform (Ø2.9 BL implant)
- NP : Dar Platform (Ø3.2 - Ø3.7 BL implant)
- RP : Regular Platform (Ø4.1 - Ø4.8 BL implant)
- RN : Regular Neck (Ø4.1 TL implant)
- WN : Wide Neck (Ø4.8 TL implant)



ÖLÇÜ PARÇALARI VE ANALOGLAR

Kemik Seviyesi Ölçü Parçaları ve Analoglar

Açık Ölçü Postu

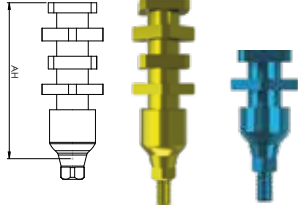

Dar Platform
Regular Platform




AH

Ürün Kodu

8.5 mm (kısa) IP0013
15 mm (uzun) IP0001

8.5 mm (kısa) IP0015
15 mm (uzun) IP0003

Kapalı Ölçü Postu

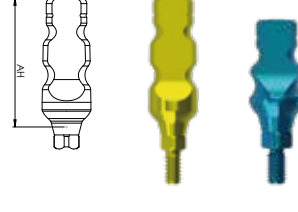

Dar Platform
Regular Platform



AH

Ürün Kodu

9 mm (kısa) IP0017
12 mm (uzun) IP0005

9 mm (kısa) IP0019
12 mm (uzun) IP0007

Kapalı Ölçü Postu Plastiği



Ürün Kodu
IP0009

Ürün Kodu
IP0010

Analoglar




Ürün Kodu
IP0011

Ürün Kodu
IP0012

Doku Seviyesi Ölçü Parçaları ve Analoglar

Açık Ölçü Postu

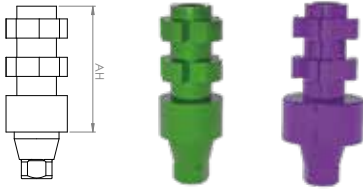


AH

Ürün Kodu

RN 9.5 mm IP0035
WN 9.5 mm IP0037

Kapalı Ölçü Postu

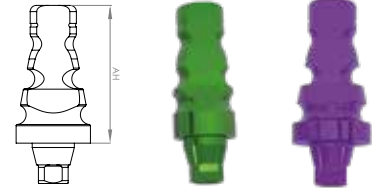

AH

Ürün Kodu

RN 10.5 mm IP0039
WN 10.5 mm IP0041

Analoglar



Ürün Kodu
IP0043

Ürün Kodu
IP0044

NP : Dar Platform (Ø3.2 - Ø3.7 BL implant)
RP : Regular Platform (Ø4.1 - Ø4.8 BL implant)
RN : Regular Neck (Ø4.1 TL implant)
WN : Wide Neck (Ø4.8 TL implant)

Multi-unit Ölçü Parçaları ve Analoglar

Kemik Seviyesi



Açık Ölçü Postu,
Kron (Lock)

Ürün Kodu IP0026



Açık Ölçü Postu,
Köprü (Nolock)

Ürün Kodu IP0073



Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0028



*Düz Analog

Ürün Kodu IP0030



*15° Açılı Analog

Ürün Kodu IP0031



Kron

Plastik Koping

Ürün Kodu IP0033



Köprü

Plastik Koping

Ürün Kodu IP0034

*Düz ve açılı analog platformları tamamen aynıdır ve biri diğerinin yerine kullanılabilir. (NP&RP)

Doku Seviyesi



RN Açık Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0045



WN Açık Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0047



RN Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0049



WN Kapalı Ölçü Postu

Ürün Kodu IP0051



RN Analog

Ürün Kodu IP0053



WN Analog

Ürün Kodu IP0054



Köprü

RN Plastik Koping

Ürün Kodu IP0055



Köprü

WN Plastik Koping

Ürün Kodu IP0056

NP : Dar Platform (Ø3.2 - Ø3.7 BL implant)
RP : Regular Platform (Ø4.1 - Ø4.8 BL implant)
RN : Regular Neck (Ø4.1 TL implant)
WN : Wide Neck (Ø4.8 TL implant)

KIT & ALETLER

Cerrahi Kit




Ürün Kodu CERS

İtalyan estetiği ve patentli grommet-less (düz silikon yüzey) teknolojisi ile polyphenylsulfone (PPSU) malzemedan üretilen Bilimplant® Cerrahi Kiti;

- *temizlik/dezenfeksiyon sürecini kolaylaştırır,
- *cerrahi işlemlerde maksimum güvenlik sağlar
- *silikon ve plastik elementler arasında kir barındırmaz


Materyal : PPSU

Cerrahi Kit İeriđi

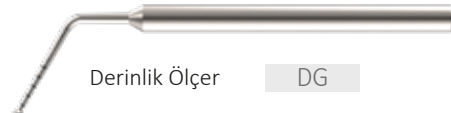Paralel Pinler	 100AP	 101PP	 102PP	 103PP	 104PP		
Taşıma Parçaları	 Uzun, 24 mm TSP24	 Orta, 19 mm TSP19	 Kısa, 12 mm TSP12	 Anguldruva TSPA21	 İmplant Çıkarma Anahtarları IDPSP	 IDPNP	 IDPRP
Anahtarlar	 Uzun, 28 mm SCSA28	 Orta, 23 mm SCSA23	 Kısa, 16 mm SCSA16	 Açılı ASCSA	 Derinlik Ölçer DG		
Tornavida	 HS						
Gode	 GD	 Torklu Raşet TRCHTV2					

Cerrahi Kit İçeriği

	Pilot / Ø2.9	Ø3.2	Ø3.7	Ø4.1	Ø4.8
Final Driller					
	Uzun Kısa	Uzun Kısa	Uzun Kısa	Uzun Kısa	Uzun Kısa
	PDL22 PD22	IDL32 ID32	IDL37 ID37	IDL41 ID41	IDL48 ID48
	Ø 2.35	Ø2.7	Ø3.2	Ø3.6	Ø4.3
Kortikal					
	CD29	CD32	CD37	CD41	CD48
	Ø 2.9	Ø3.2	Ø3.7	Ø4.1	Ø4.8

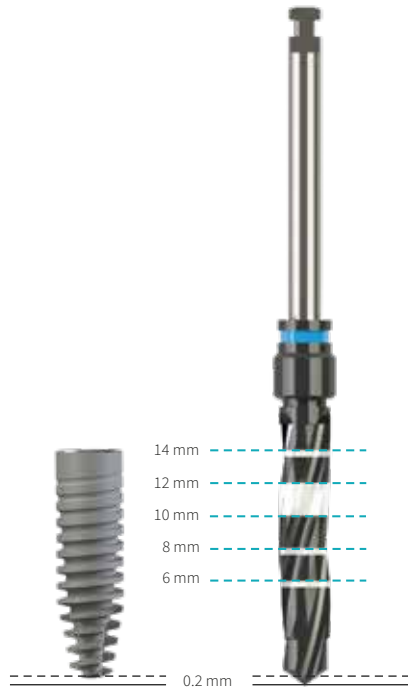

Profil Oluşturucu		
	BLPONP	BLPORP
Platform	NP	RP

İşaretleme (Konik Drill) CND25	İşaretleme (Yuvarlak) PDRB	Drill Uzatma DEXT

Stopper Kit

6mm	 DS3206	 DS3706	 DS4106	 DS4806
8mm	 DS3208	 DS3708	 DS4108	 DS4808
10mm	 DS3210	 DS3710	 DS4110	 DS4810
12mm	 DS3212	 DS3712	 DS4112	 DS4812
14mm	 DS3214	 DS3714	 DS4114	 DS4814




DSK



Örnek: 12 mm drill stop




Sinüs Osteotom Kit

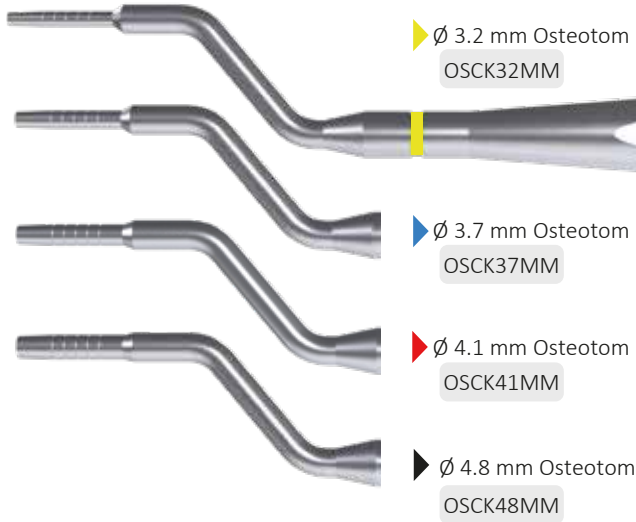


OSK

Kemik Geniřleme Kiti

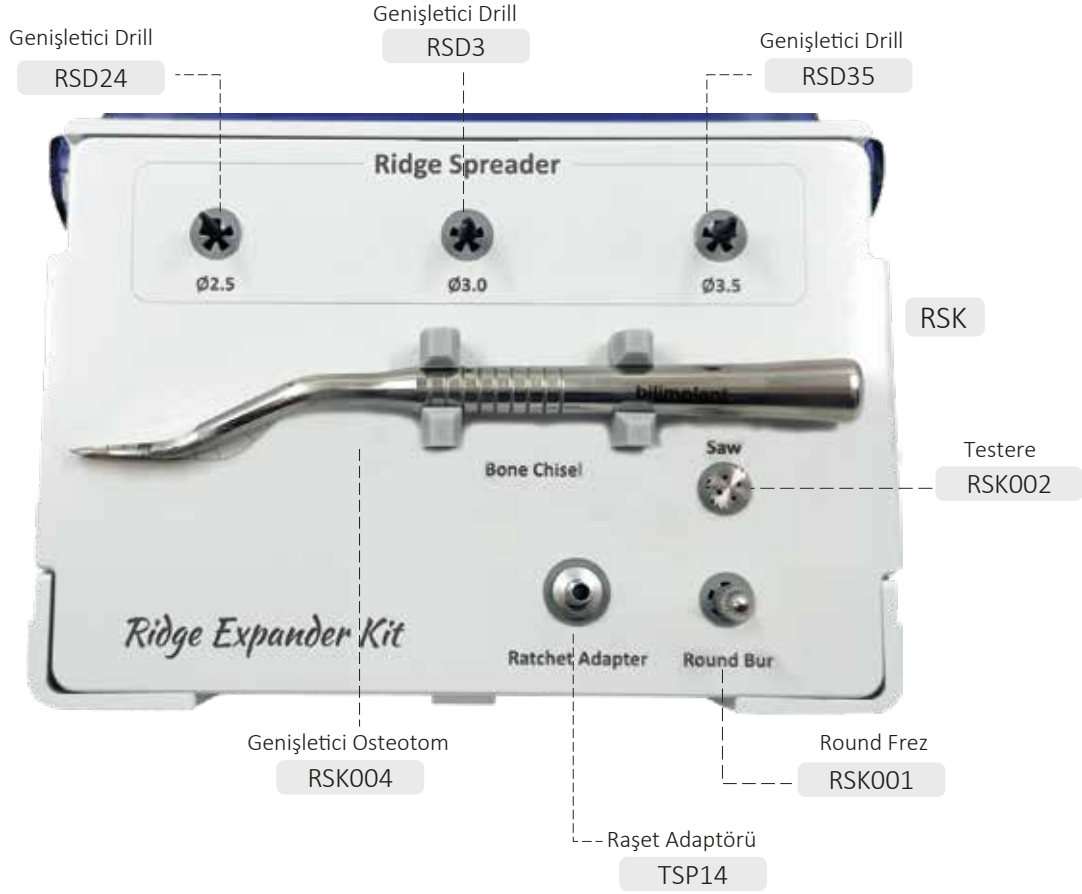

Vida ıkartma Kiti

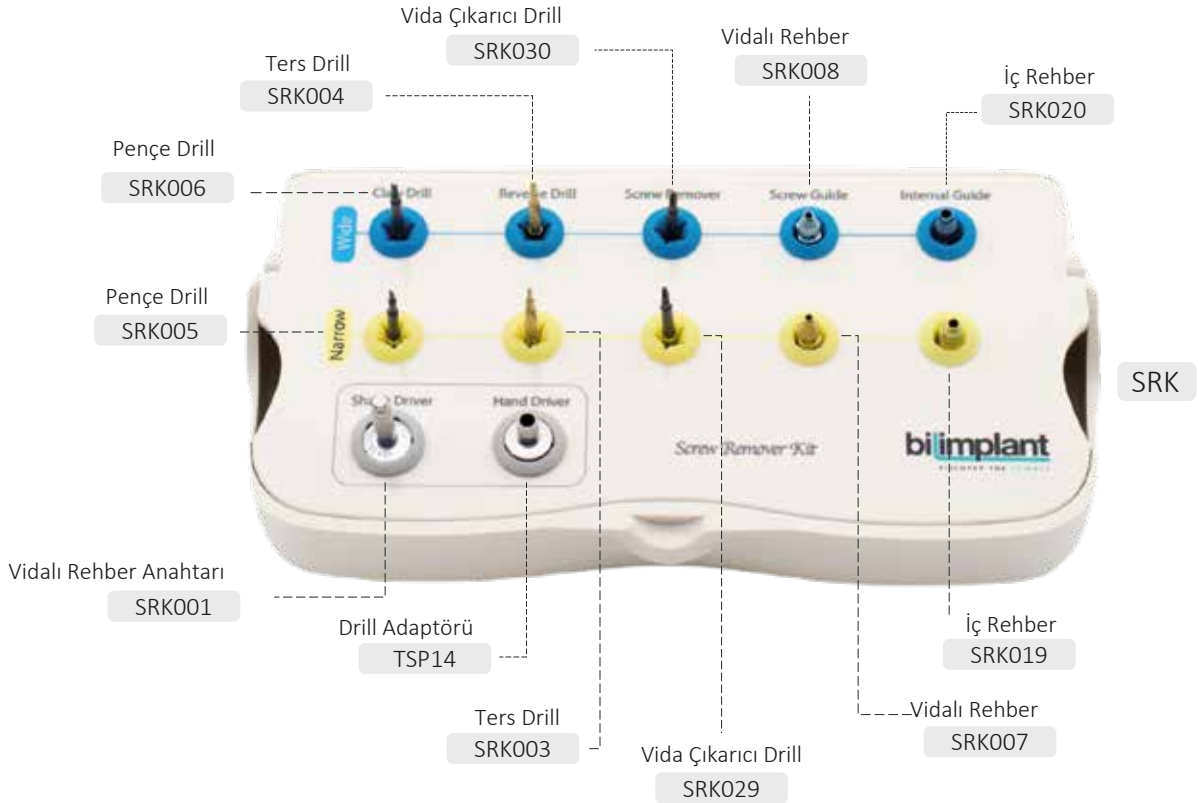


Doğru kullanım için lütfen vida ıkartma kit kullanım kılavuzunu okuyunuz.

bguide Rehberli Cerrahi Kit



Kolaylık ve Güvenle Klinik Başarıya Ulaşmanıza Rehberlik Ediyoruz

All on Four & Dayanak Seçim Kiti

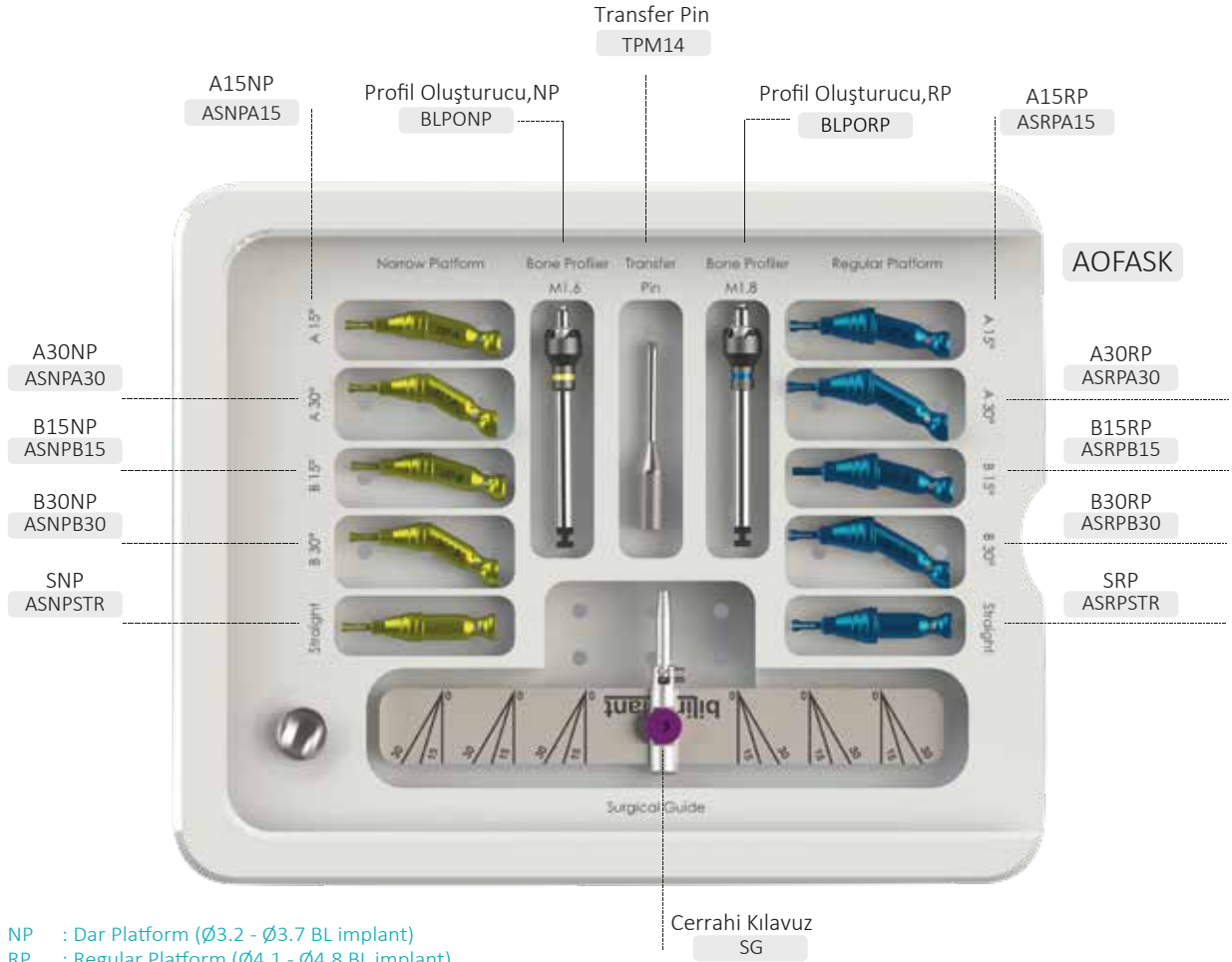

NP : Dar Platform (Ø3.2 - Ø3.7 BL implant)
RP : Regular Platform (Ø4.1 - Ø4.8 BL implant)

Ortodontik Mini Vida Kiti



GBR Kit



Dijital Çözüm Ortaklarımız

exocad

3shape
IMPLANT STUDIO



RealGUIDE®
UNIVERSAL OPEN SYSTEM



NemoScan

OSSTELL
A UISH COMPANY

SmartPeg Reference Guide
Valid from December 2018 | 25016-67

Implant Company	Model	Diameter (mm)	SmartPeg	New
Bilimplant	Bone Level Implant	3.2 - 3.7	100402	Type21
	Bone Level Implant	4.1- 4.8	100480	Type49

Dijital Çözüm Ortaklarımızla Her Şey Daha Kolay ve Daha Güvenli.

Tüm dijital kütüphanelerimize <https://www.bilimplant.com/indirme-merkezi/kutuphane/> linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vizyona
Tecrübeye
Kaliteye
Bilime
DOKUN

A STRONG STEP FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE!

First R&D Center Approved by the Ministry of Industry and Technology in the Dental Sector



ProimTech Sağlık Ürünleri A.Ş.

Dudullu OSB Mahallesi İmes 305 Sokak C blok No:3

Ümraniye / İstanbul-Türkiye

www.bilimplant.com



CE 2975



Nesiller Boyu Güven, Başarı ve Mutluluk!



DISCOVER *the* POWER!



Rock-bil®



Daha yüksek sertlik ve çekme mukavemeti!
(min. 900 Mpa)

ROCK-BIL



