

Bilimplant / Exocad Kütüphane Yükleme Rehberi

Bilimplant Exocad V7.0.1


02/08/2023




Dudullu OSB Mahallesi İmes 305 Sokak C Blok No:3 Ümraniye / İSTANBUL / TURKEY

Web: www.bilimplant.com **E-mail:** info@bilimplant.com **Phone :** +(90) 216 999 50 41



İndirmiş olduğunuz Bilimplant.zip dosyasını açınız.

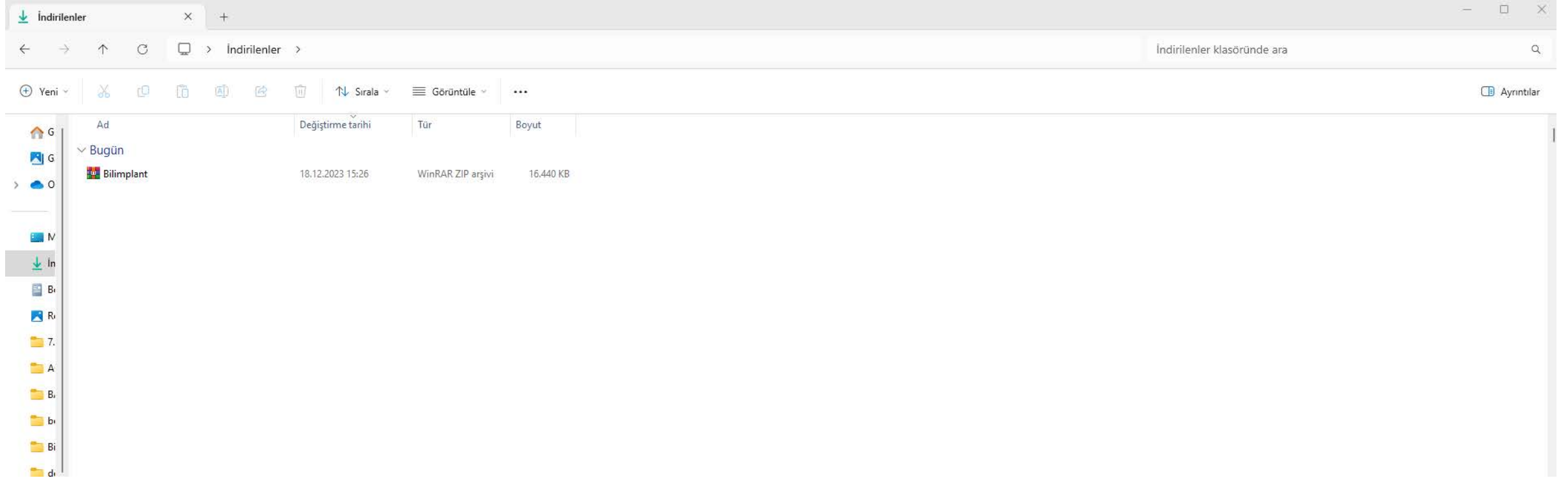


Bilimplant Exocad V7.0.1.rar dosyasını bulunduđu yere çıkartınız.

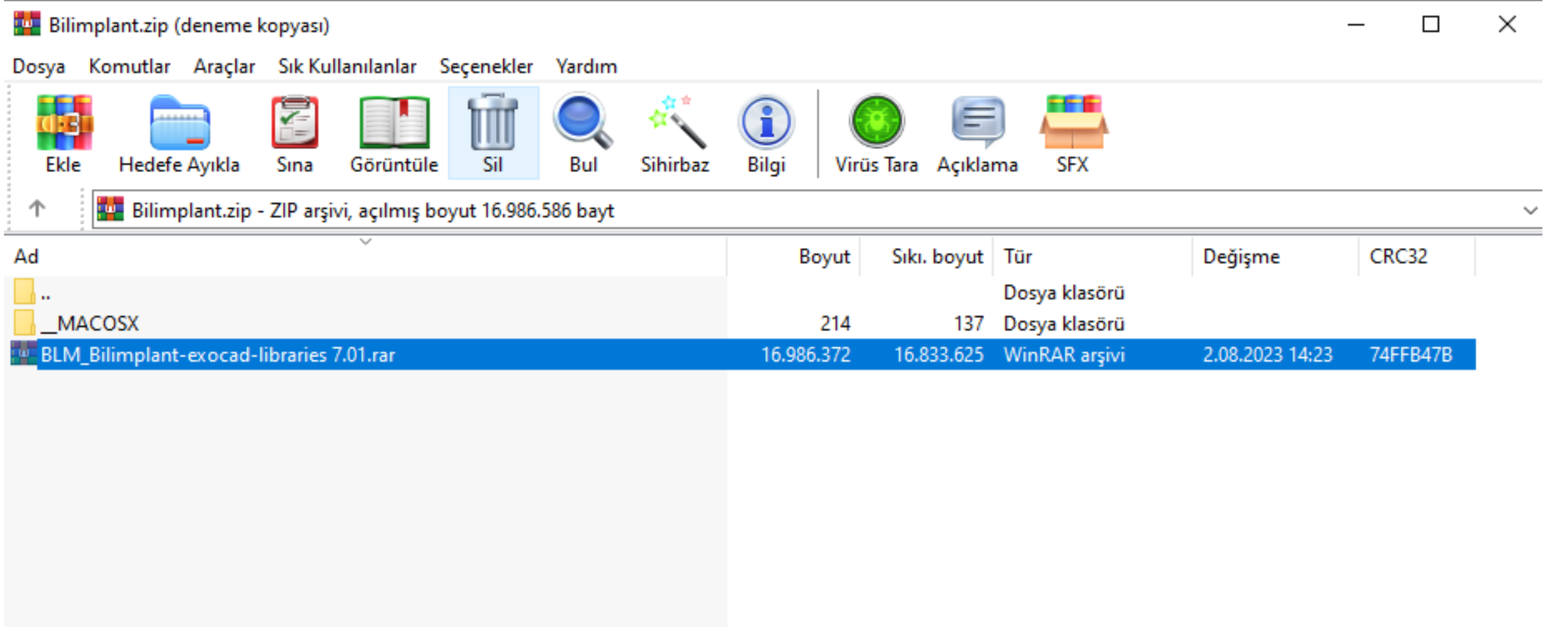


BLM_Bilimplant-exocad-libraries 7.01 klasörüne ardından implant klasörüne giriniz.

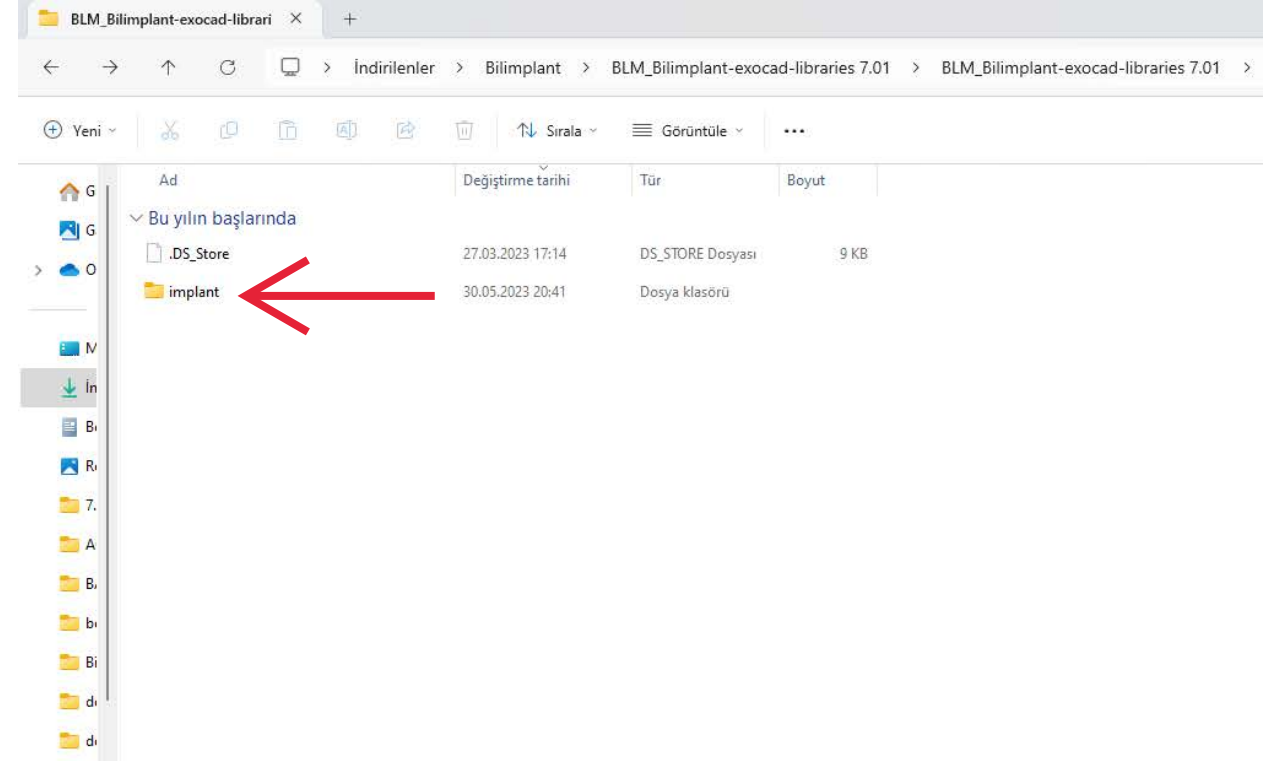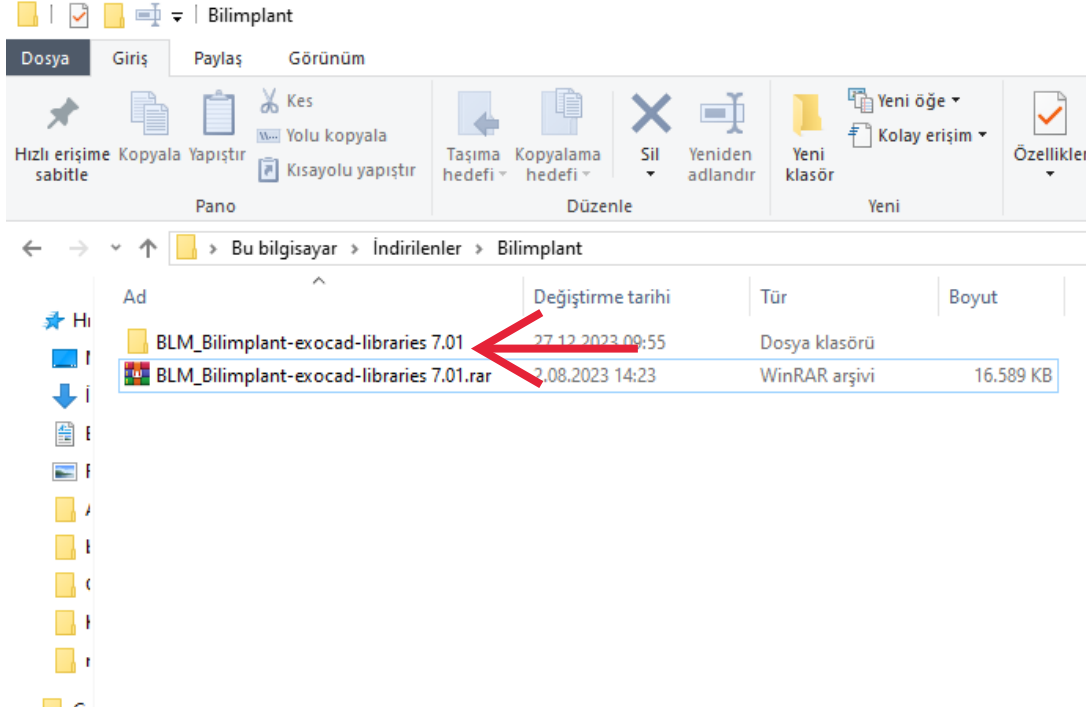

BLM_Bilimplant-exocad-libraries klasörüne giriniz.

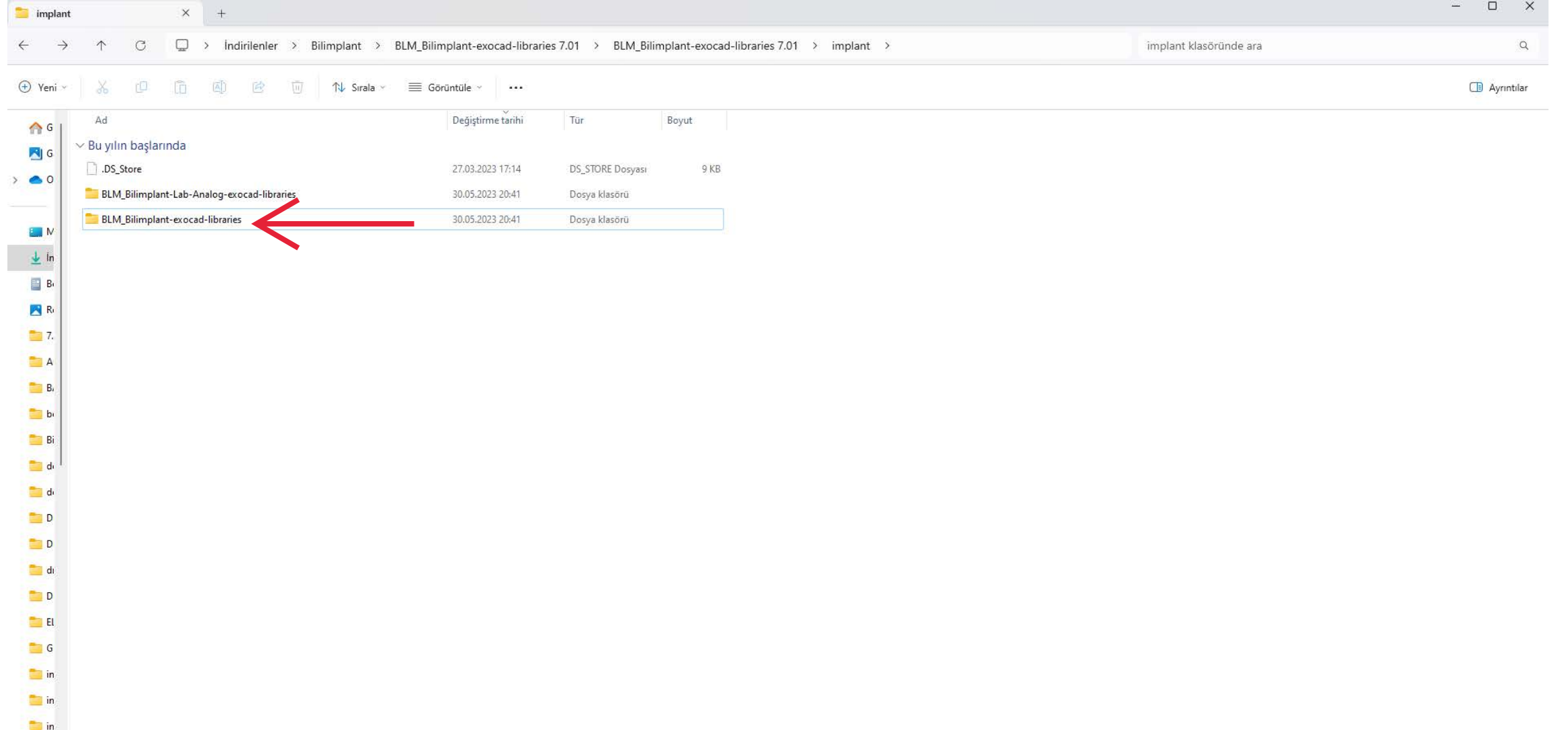

Her iki klasörü kopyalayınız.


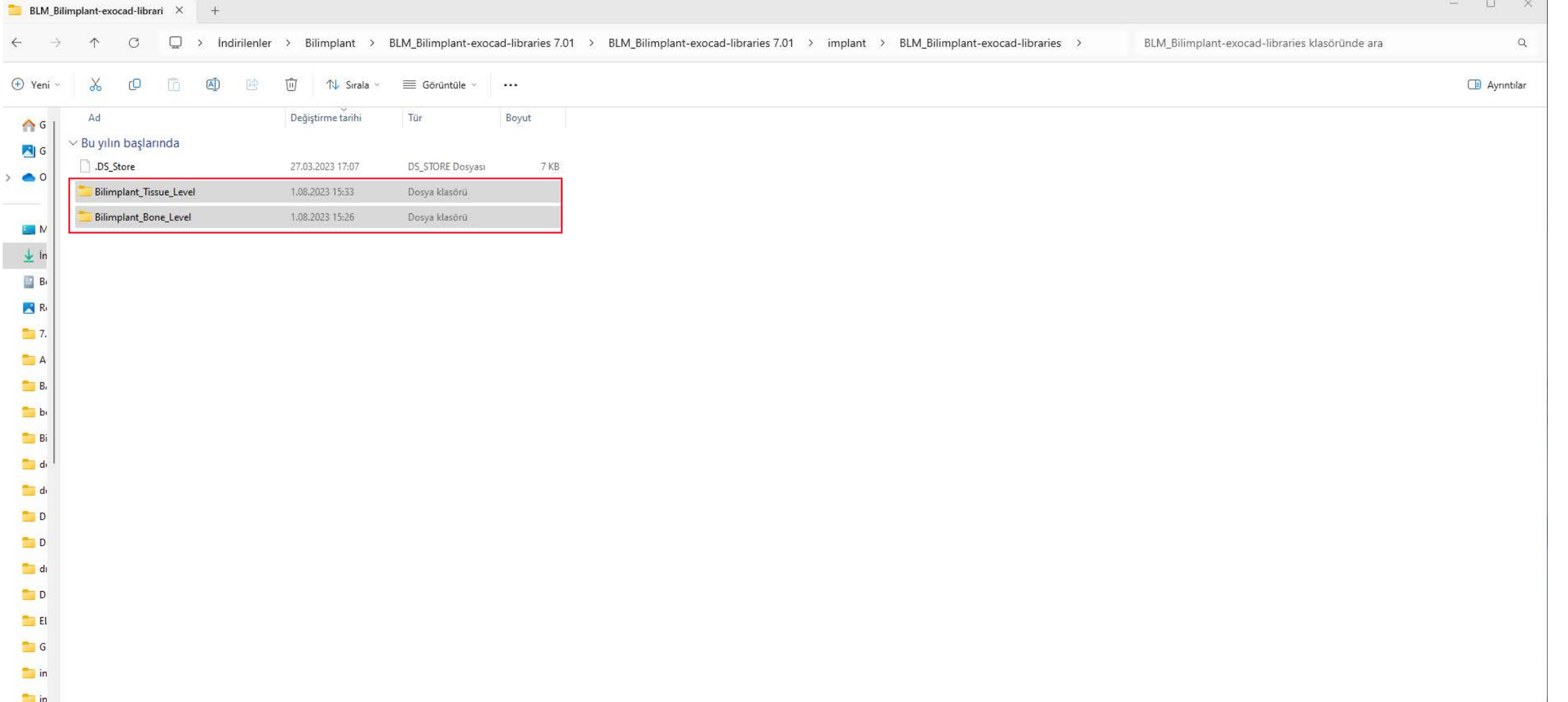


Kopyaladığınız klasörleri\\DentalCADApp\\library\\implant klasörünün içerisine yapıştırınız.


 BBDental_EVOLUTION_STANDARD_plan	4.12.2018 01:08	Dosya klasörü
 BBDental_WIDE_STANDARD_plan	4.12.2018 01:08	Dosya klasörü
 Bicon_MAX2.5_plan	4.12.2018 01:08	Dosya klasörü
 Bicon_NARROW_plan	4.12.2018 01:08	Dosya klasörü
 Bicon_SHORT_plan	4.12.2018 01:08	Dosya klasörü
 Bilimplant_Bone_Level	18.12.2023 15:44	Dosya klasörü
 Bilimplant_Tissue_Level	18.12.2023 15:44	Dosya klasörü
 BioMicron_BSC_plan	11.03.2019 16:12	Dosya klasörü
 BioMicron_ICI_SinOcta_ENG_plan	17.04.2019 13:28	Dosya klasörü
 BioMicron_ICI_SinOcta_plan	17.04.2019 13:29	Dosya klasörü
 BioMicron_IJI_PEN_plan	6.03.2019 19:54	Dosya klasörü
 BioMicron_ISC_plan	6.03.2019 19:54	Dosya klasörü

Modelcreator Kurulumu



En başta indirmiş olduğunuz BLM_Bilimplant-exocad-libraries 7.01 klasörüne ardından implant klasörüne giriniz.

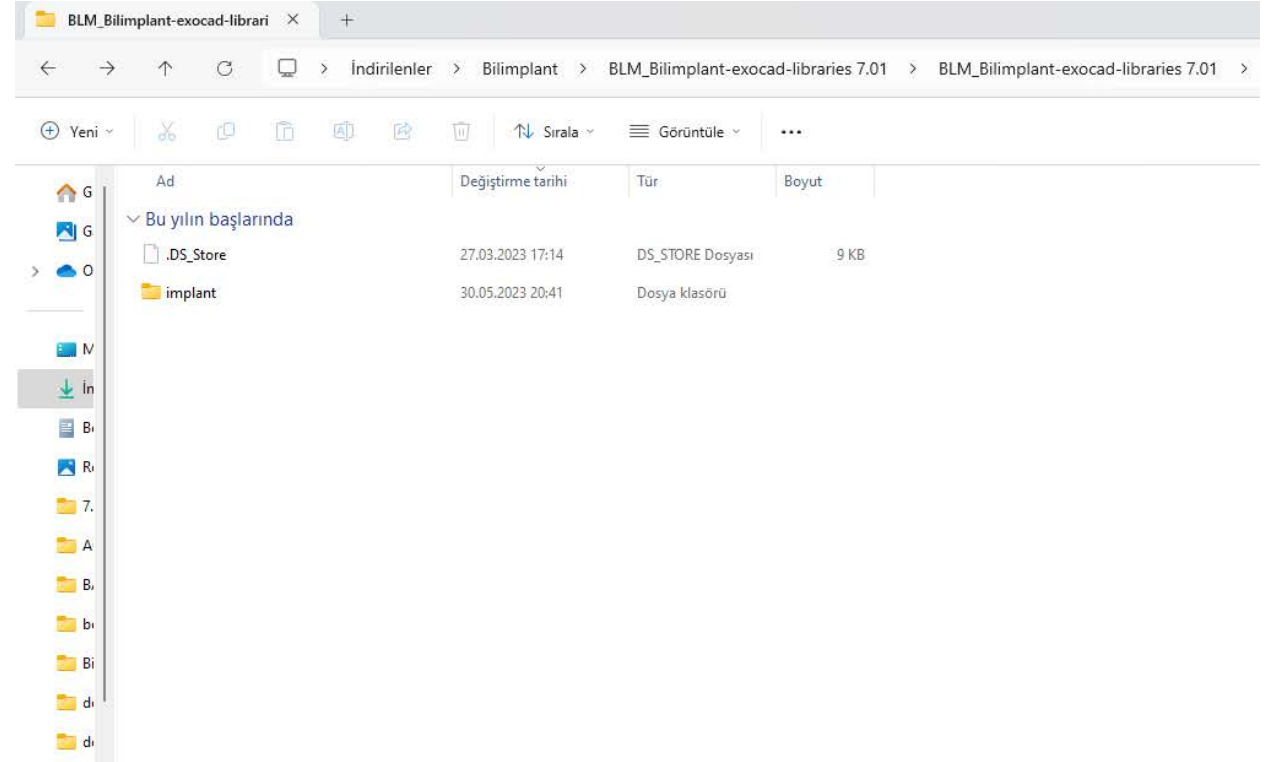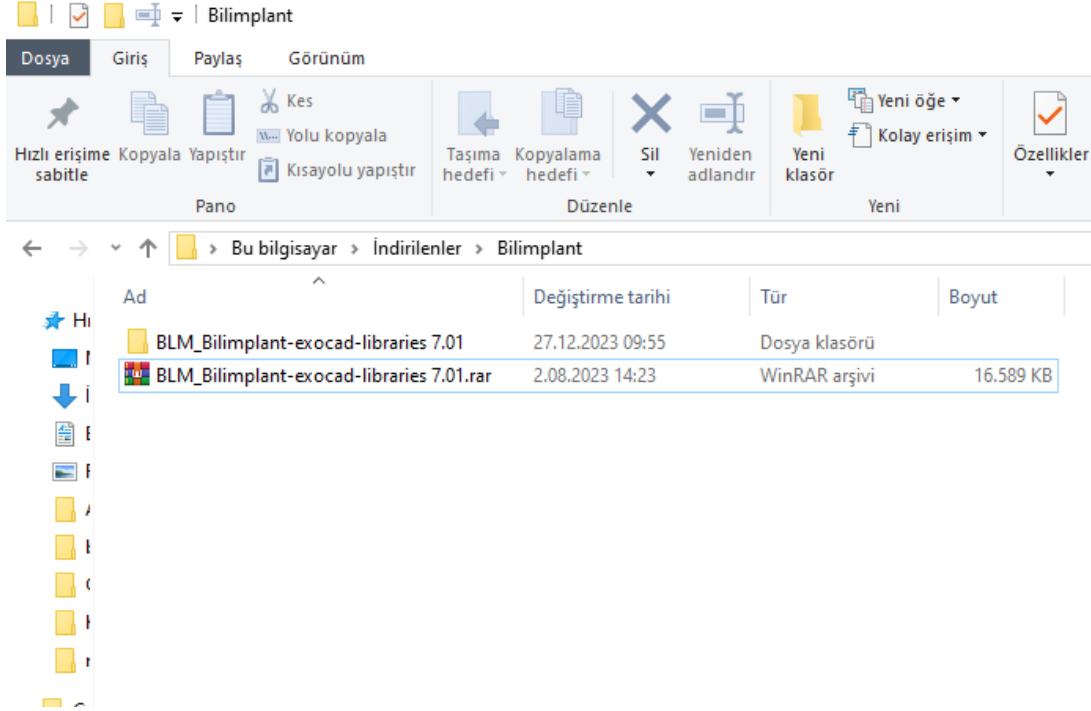

BLM_Bilimplant-Lab-Analog-exocad-libraries klasörüne giriniz.

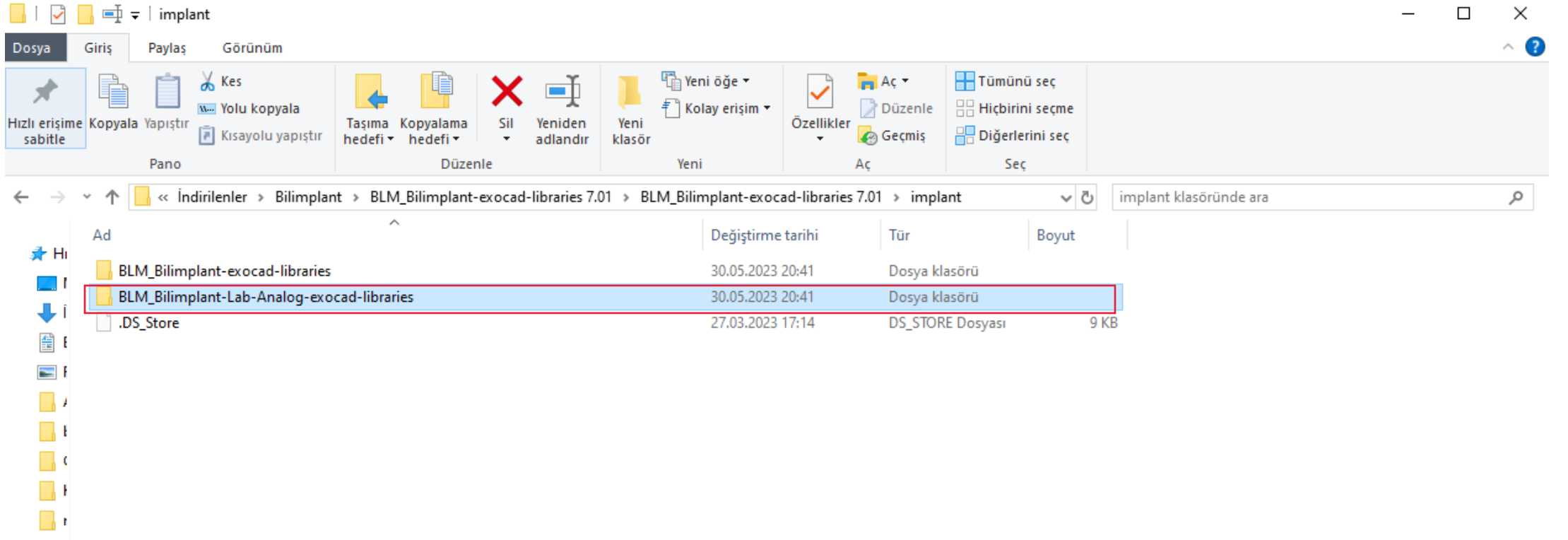

modelcreator klasörüne ardından implants klasörüne giriniz.

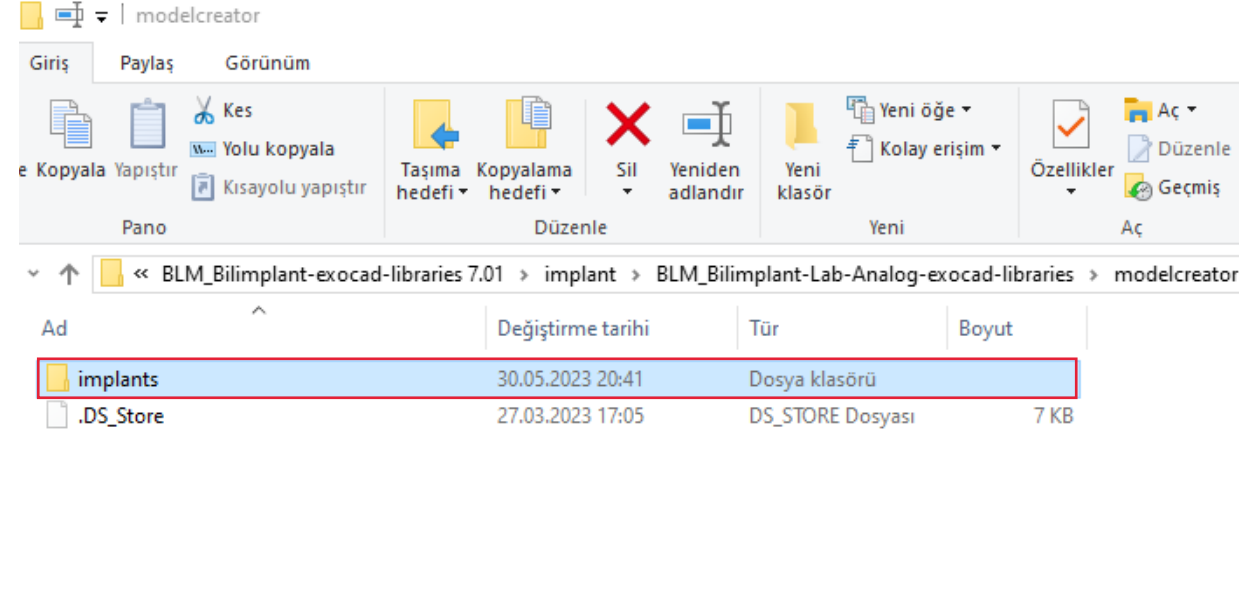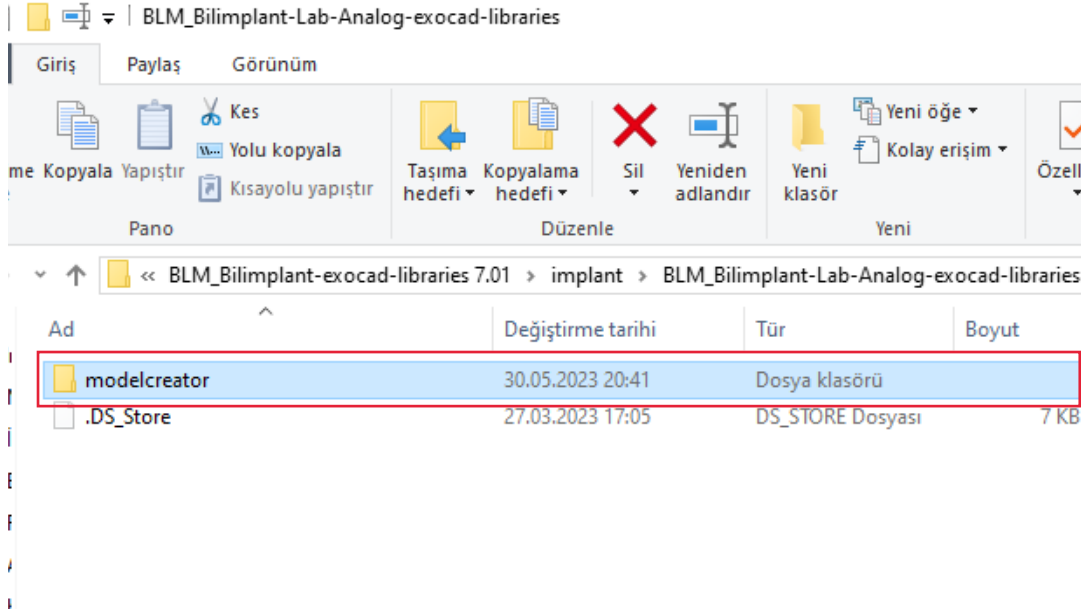

Her iki klasörü kopyalayınız.

implants

Dosya Giriş Paylaş Görünüm

Hızlı erişime sabitle Kopyala Yapıştır Kes Yolu kopyala Kısayolu yapıştır Taşıma hedefi Kopyalama hedefi Sil Yeniden adlandır Yeni klasör Yeni öğe Kolay erişim Özellikler Aç Düzenle Geçmiş Tümünü seç Hiçbirini seçme Diğerlerini seç

Pano Düzenle Yeni Aç Seç

< implant > BLM_Bilimplant-Lab-Analog-exocad-libraries > modelcreator > implants implants klasöründe ara

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
Bilimplant_Bone_Level_MC	30.05.2023 20:41	Dosya klasörü	
Bilimplant_Tissue_Level_MC	30.05.2023 20:41	Dosya klasörü	
.DS_Store	27.03.2023 17:05	DS_STORE Dosyası	7 KB

Kopyaladığınız klasörleri\\DentalCADApp\\library\\implant klasörünün içerisine yapıştırınız.

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
AB-Dental_NP_Digital_Analog	7.08.2019 17:37	Dosya klasörü	
AB-Dental_P64_Digital_Analog	9.07.2019 10:21	Dosya klasörü	
AB-Dental_SP_Digital_Analog	7.08.2019 17:37	Dosya klasörü	
Alpha-Bio_Tec_CHC	24.01.2019 13:06	Dosya klasörü	
Alpha-Bio_Tec_CS	24.01.2019 13:06	Dosya klasörü	
Alpha-Bio_Tec_IH	24.01.2019 13:06	Dosya klasörü	
Anker_SB-BL	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
Anthogyr_Labside_MB	4.12.2018 01:27	Dosya klasörü	
Bicon	29.07.2019 11:12	Dosya klasörü	
Bilimplant_Bone_Level_MC	27.12.2023 10:25	Dosya klasörü	
Bilimplant_Tissue_Level_MC	27.12.2023 10:25	Dosya klasörü	
BioComp_CMF_implant	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
BioComp_implant	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
BioConnect_implant	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
BioHorizons_Analogs_Vulcan	5.08.2019 15:23	Dosya klasörü	
Biomax_Argo_analog	11.02.2019 16:22	Dosya klasörü	
Biomax_Standard_analog	11.02.2019 16:22	Dosya klasörü	
BIOMET_3i_FlexLink_TiBase_Model_Analog	19.12.2018 14:03	Dosya klasörü	
C3D_AV	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_NB_AC	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_NB_BM	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_NB_MU	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_NB_RP	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_STR_BL	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	
C3D_STR_MU	4.12.2018 01:11	Dosya klasörü	

Yapıştırma işleminin ardından, Exocad yeniden başlatılmalıdır. Bu aşamadan sonra Bilimplant kütüphanesi kullanıma hazırdır.



Dudullu OSB Mahallesi İmes 305 Sokak C Blok No:3 Ümraniye / İSTANBUL / TURKEY

Web: www.bilimplant.com **E-mail:** info@bilimplant.com **Phone :** +(90) 216 999 50 41